



Akutol[™] PLANTAGEL HOME PLUS



Polymer hydrogel, Acid Hyaluronic, Panthenol... và các thảo dược

Akutol Plantagel Home Plus là hệ gel ưa nước (Polymer hydrogel) kết hợp các thành phần như axit hyaluronic, panthenol... và các thảo dược giúp thúc đẩy liền nhanh các vết thương cấp tính, vết thương mạn tính và các vết bỏng.

Thành phần:

Polymer hydrogel, chiết xuất thảo dược từ cây dẻ gai, cây mộc liên, cây hắc mai, cây macca, sodium hyaluronate, D-Panthenol, Tocopheryl acetate (Vitamin E), Elastin thủy phân, Aqua, Octyldodecanol, Cetearyl Ethylhexanoate, Ceteareth-25, Triethanolamine, polymer, Propylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Elastin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Công dụng:

- Thúc đẩy nhanh quá trình liền vết thương bằng phương pháp lành ướt.
- Trên vết thương tiết dịch nhiều, gel có tác dụng hút các tiết tố từ vết thương vào chuỗi polymer, tạo độ ẩm lý tưởng cho quá trình liền thương.
- Trên vết thương khô, gel cấp nước vào vết thương, cân bằng độ ẩm, tạo rào cản chống viêm thứ cấp từ môi trường xung quanh, tạo môi trường vi sinh thuận lợi cho việc tái tạo và liền thương nhanh.
- Kích thích giai đoạn làm sạch, tạo hạt và tái tạo biểu mô trên vết thương.
- Các hoạt chất và phụ gia tác dụng hiệu quả hỗ trợ quá trình tái tạo nhanh vùng bị tổn thương, giảm thiểu hình thành sẹo.
- Chiết xuất từ cây dẻ gai, cây mộc liên có tác dụng làm vững chắc tế bào kháng viêm.
- Chiết xuất từ cây hắc mai và vitamin E có tác dụng chống lại gốc tự do.
- Axit hyaluronic và Panthenol dưỡng ẩm cho vết thương và hỗ trợ quá trình tái tạo, axit hyaluronic góp phần vào quá trình tạo những tế bào ngoại bào mới, hỗ trợ làm mềm và chống hình thành sẹo.

Chỉ định:

- Vết bỏng từ nhẹ đến nặng.
- Các vết thương trên da, sau phẫu thuật vẫn còn chảy dịch.
- Các vết thương mạn tính như do tỳ đè, dải tháo đường, giãn tĩnh mạch, trĩ...
- Các vết nứt da: nứt nẻ mụn, kẽ hậu môn, môi...
- Vết côn trùng cắn và các tổn thương da khác.

Cách dùng:

- + Dùng nước rửa sạch các vết bẩn cơ học bám trên vết thương
- + Trường hợp vết thương bị ô nhiễm nặng, dùng dung dịch sát trùng chuyên dụng.
- + Bôi lớp gel dày khoảng 2mm cho kín vết thương, sao cho gel không chảy ra ngoài vết thương.
- + Đối với vết thương nhỏ không nên phủ vết thương.
- + Ở những vùng dễ bị cọ sát làm mất lớp gel, dùng gạc không thấm nước và thoáng khí để phủ lên vết thương.
- + Thường xuyên bổ sung lớp gel trên vết thương tránh để vết thương bị khô.
- + Mỗi ngày một lần rửa hết lớp gel cũ trên vết thương bằng nước sạch, sau đó bôi lớp gel mới dày 2mm.
- + Nếu vết thương có triệu chứng viêm nhiễm bởi vi khuẩn (mưng mủ, có mùi hôi, có màu vàng và chuyển sang màu xanh lục) cần phải dùng nước sạch để rửa hết các vết bẩn cơ học, sau đó dùng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng. Chỉ sau khi đã làm sạch và sát khuẩn vết thương mới bôi lớp gel mới.
- + Quy trình làm sạch và sát khuẩn vết thương được áp dụng nhiều lần cho đến khi hết các triệu chứng viêm nhiễm.

Lưu ý:

Không sử dụng khi bị dị ứng với bất kì thành phần nào trong sản phẩm. Để xa tầm tay trẻ em. Sử dụng theo thời hạn ghi trên bao bì sản phẩm.

Chống chỉ định:

Chưa phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào cho đến thời điểm hiện tại.

Bảo quản:

Nơi khô ráo và không có ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C.

Quy cách đóng gói:

Tuýp 5g, 10g, 20g, 30g, 50g gel.

Hạn dùng:

In trên vỏ hộp. Sau khi mở nắp có thể dùng được trong phạm vi 01 tháng.

SDK: 109/170000001/PCBPL-BYT.

Nhà sản xuất: Aveflor a.s.

Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Cộng Hòa Séc (EU).

