

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUE THỬ THAI NHANH HCG

4 mm

Human Chorionic Gonadotrophin Test Kit (Colloidal Gold)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em

1. THÀNH PHẦN:

Kháng thể kháng β -hCG: 0,5 mg/ml; kháng thể kháng α -hCG: 0,7 mg/ml; kháng thể để kháng IgG chuột: 1,5 mg/ml.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Định tính hormone HCG trong nước tiểu người giúp phát hiện sớm thai kỳ (7 – 10 ngày sau khi thụ thai).

Cách thử:

- + Lấy nước tiểu vào cốc, nên lấy nước tiểu giữa (không nên lấy nước tiểu đầu và cuối).
- + Lấy que thử khỏi bao nhôm và sử dụng càng sớm càng tốt (nên dùng trong vòng 10 phút).
- + Cắm que thử vào trong cốc nước tiểu theo chiều mũi tên (không ngập quá vạch đánh dấu).
- + Lấy que thử ra sau 5 - 15 giây. Để que thử trên mặt phẳng khô, sạch.
- + Đọc kết quả trong 5 phút nhưng không lâu hơn 10 phút.

Đọc kết quả:

- Dương tính (có thai): hai vạch màu xuất hiện trên que thử ở cả vùng chứng (C) và vùng thử (T).
- Âm tính (không có thai): chỉ có một vạch màu xuất hiện tại vùng chứng (C). Không có vạch màu nào xuất hiện tại vùng thử (T).
- Không đạt: nếu không có vạch màu nào xuất hiện hoặc chỉ có vạch thử mà không có vạch chứng, nên thử lại với que thử mới.

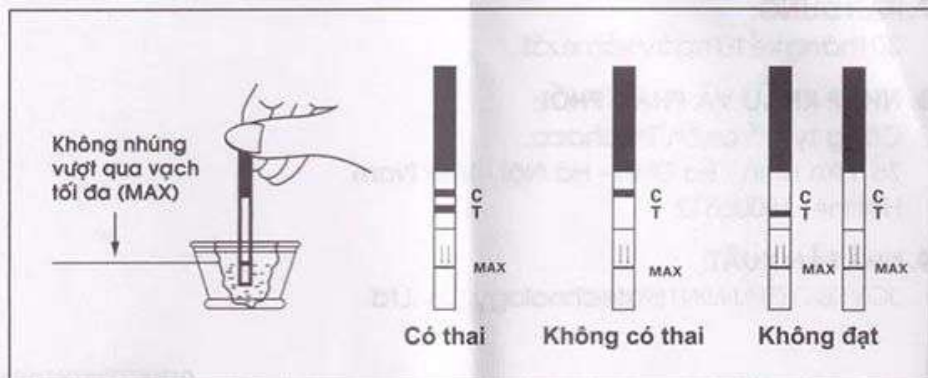

3. HIỆU NĂNG CỦA SẢN PHẨM:

- **Độ nhạy phân tích:** 25 mIU/ml hCG (tương đương với nồng độ hCG trong nước tiểu sau khi thụ thai khoảng 1 – 2 tuần)
- **Độ đặc hiệu chẩn đoán:**
 - + Độ đặc hiệu âm tính: 100% (150/150 mẫu nước tiểu cho kết quả chính xác).
 - + Độ đặc hiệu dương tính: 100% (150/150 mẫu nước tiểu cho kết quả chính xác).
- **Độ chính xác:** 100% (30/30 que thử cho kết quả chính xác).

4. THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi thử. Chú ý vị trí của vạch thử và vạch chứng.
- Bộ dụng cụ thử phải được giữ trong túi kín cho đến khi sử dụng. Không sử dụng nếu túi bị hỏng hoặc mở. Không sử dụng lại que thử. Vứt bỏ nó trong thùng rác sau một lần sử dụng.

5. CÁC DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO:

- Mẫu thử có mức hCG thấp có thể cho thấy sự phát triển màu theo thời gian. Nếu có kết quả âm tính nhưng nghi ngờ có thai, nên lấy mẫu khác sau 48 - 72 giờ và thử nghiệm.
- Rượu có thể can thiệp vào kết quả xét nghiệm. Không nên thử sau khi uống rượu.
- Mặc dù không cần thiết phải kiểm tra với mẫu nước tiểu vào sáng sớm, nhưng nên tránh uống quá nhiều chất lỏng trước khi xét nghiệm.

6. QUI CÁCH:

Hộp 1 que thử, 1 cốc nhựa.

7. HẠN DÙNG:

30 tháng kể từ ngày sản xuất.

8. NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:

Công ty cổ phần Traphaco.
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam.
Hotline: 18006612

9. NHÀ SẢN XUẤT:

JOYSBIO (TIANJIN) Blotechnology Co.,Ltd.

01NKTQHSD101

QUE THỬ THAI NHANH HCG

4mm

Human Chorionic Gonadotrophin test kit (Colloidal Gold)

Số giấy phép nhập khẩu: 5073/BYT-TB-CT.

Thành phần: Kháng thể kháng β -hCG: 0,5 mg/ml; kháng thể kháng α -hCG: 0,7 mg/ml; kháng thể để kháng IgG chuột: 1,5 mg/ml.

Mục đích sử dụng: định tính hormon hCG trong nước tiểu người giúp phát hiện sớm thai kỳ (7 – 10 ngày sau khi thụ thai).

Quy cách: hộp 1 que thử, 1 cốc nhựa.

Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, xuất xứ: xem LOT, MFG, EXP, Manufacturer trên bao bì trực tiếp của sản phẩm.

Cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Bảo quản: nhiệt độ 4 - 30^oC, nơi khô ráo

NK và PP: **Công ty CP Traphaco** 75 Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội – Việt Nam

Giá bán: