

1. Chức năng:

- Neo ép, cố định xương đòn.

2. Chỉ định:

- Cố định chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn.
- Vỡ xương bả vai, trật khớp ức - đòn.
- Teo cơ delta, cơ ức - đòn - chũm.

3. Vật liệu:

- Vải cotton, mút xốp.
- Khóa Velcro.

4. Bảo quản:

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt bằng tay trong nước có xà phòng, phơi khô nơi thoáng mát.
- Không giặt và làm khô bằng máy.

5. Hướng dẫn sử dụng:

- Tư thế bệnh nhân: ngồi, hai tay chống mạn sườn, uốn ngực.
- Lấy đai ra khỏi túi, mở rộng, kiểm tra các dây đai ở tư thế mở.
- Đeo, lắp đai nhẹ nhàng, tránh gây đau cho bệnh nhân tùy theo các tư thế. Cố định từng nấc từ lỏng đến chặt (đủ chắc, không gây đau hay chèn ép).
- Kiểm tra cử động các khớp liên kề ở tư thế cho phép đối với từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
- Căn dặn bệnh nhân giữ tư thế cố định cần thiết, kiểm tra định kỳ thời hạn cố định cho từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

6. Bảng cỡ + Mã số sản phẩm:

Cỡ sản phẩm	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Số đo vòng ngực (cm)	41-51	51-61	61-75	76-85	86-95	96-105	>105
MS Sản phẩm H1	100XXS	100XS	100S	100M	100L	100XL	100XXL
MS Sản phẩm ORBE			140S	140M	140L	140XL	140XXL



Đai số 8 H1



Đai số 8 ORBE