

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỤNG CỤ HÚT MŨI (NASAL ASPIRATOR)



Model HM03: DỤNG CỤ HÚT MŨI SILICONE SOFTTANA

(SOFTTANA SILICONE NASAL ASPIRATOR)

- **Thành phần:** Nhựa nguyên sinh và silicone đạt tiêu chuẩn.
- **Công dụng:** Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau.
- **Cách sử dụng:**
 - + Đặt nhẹ nhàng đầu hút vào mũi bé, đầu kia (ống hút) đặt vào miệng bạn.
 - + Hút từ nhẹ đến mạnh đưa dần những chất hút được vào bình chứa, tránh làm bé sợ.

Lưu ý: Trước khi hút mũi cho bé, bạn có thể nhỏ thêm nước muối sinh lý để làm loãng nước mũi hút được dễ dàng hơn.
- **Làm sạch dụng cụ:**
 - + Sau khi hút xong, mở nắp bình chứa và tháo các ống ra khỏi các bộ phận, dùng nước ấm và chổi lông rửa sạch lau khô.
 - + Rửa trước và sau mỗi lần sử dụng để nơi khô ráo, sạch sẽ.
- **Tên đơn vị sản xuất:** Công ty Cổ phần Tanaphar.
- **Địa chỉ:** Cụm Công nghiệp Thanh Oai- Bích Hòa- Thanh Oai- Hà Nội.