


ENTCLEAR® Bình rửa mũi

Đơn giản & Hiệu quả - Sử dụng dễ dàng như nhấc ngón tay

Tóm tắt sản phẩm:

Cấu tạo: Nhựa PE và PP không độc hại.

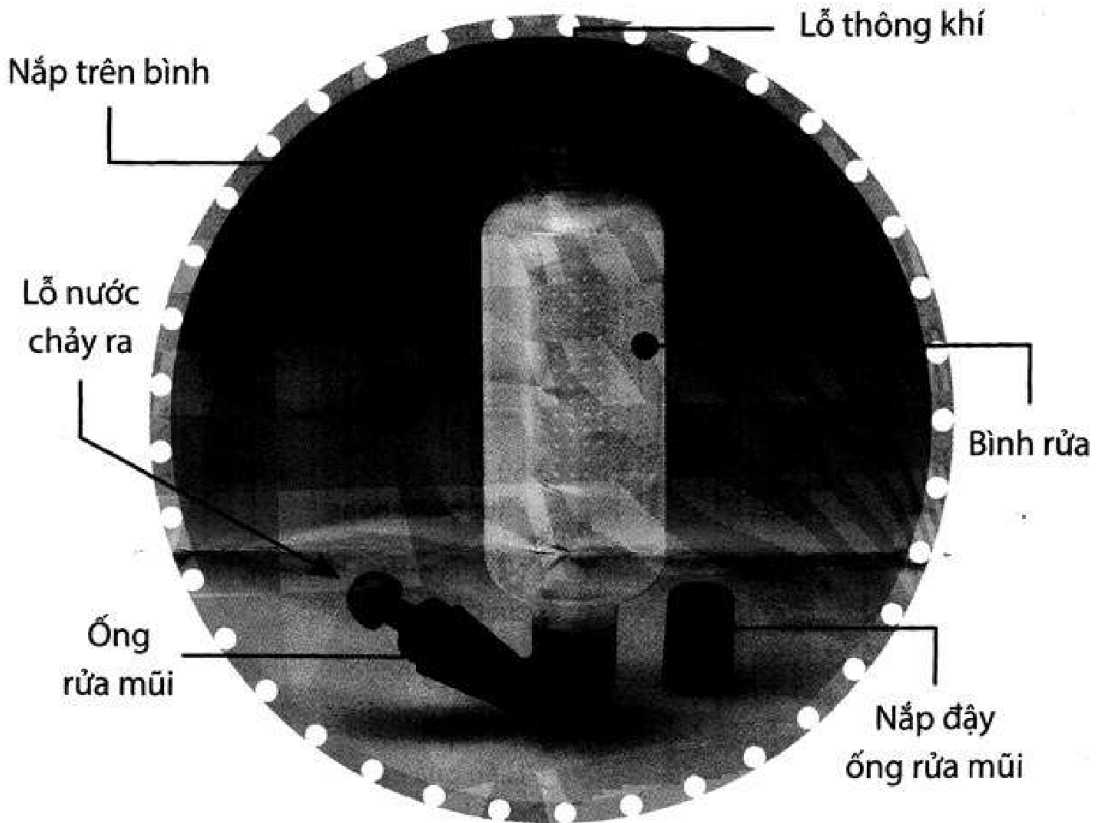

Mô tả chung:

Rửa mũi làm giảm triệu chứng của các bệnh lý mũi xoang như nghẹt mũi, khô mũi, ngứa mũi, chảy mũi, đồng thời giúp làm sạch chất nhầy và cải thiện hoạt động của hệ lông chuyển trong mũi, do đó loại bỏ một cách hiệu quả các tác nhân gây dị ứng, kích ứng và các tác nhân gây bệnh khởi đường xoang mũi. Rửa mũi giúp cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn đồng thời giúp hỗ trợ điều trị các bệnh mũi xoang.

Bộ dụng cụ **ENTCLEAR®** là một hệ thống tiên tiến và dễ sử dụng, giúp đưa dung dịch nước muối biển vào trong khoang mũi với dòng chảy liên tục, nhanh chóng rửa sạch nhẹ nhàng đường mũi xoang mà người dùng không cần phải gắng sức để bóp chặt bình rửa. Thích hợp cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi.

Chỉ định:

ENTCLEAR® rửa mũi trong các trường hợp:

- Viêm xoang cấp và mạn tính
- Viêm mũi cấp, mạn tính (Cảm cúm, viêm mũi dị ứng ...)
- Trước và sau phẫu thuật mũi, sau hóa trị liệu mũi.
- Viêm mũi - xoang thai kỳ.
- Khô mũi, nghẹt mũi, chảy mũi sau.
- Rửa mũi hàng ngày giúp phòng ngừa hữu hiệu các bệnh lý về xoang, tai mũi họng.


Liều dùng:

Để đạt được kết quả tốt nhất, sử dụng bình rửa và gói muối biển đi kèm 2 lần mỗi ngày: Sau khi đánh răng buổi sáng và buổi tối. Nếu các triệu chứng bệnh mũi nặng thì sử dụng 6-10 lần mỗi ngày.

Hướng dẫn sử dụng:

01. Rửa sạch bình bằng nước rửa chén bát trước lần đầu tiên sử dụng và rửa hàng tháng. (Chú ý: Không rửa với nước sôi). Dùng nước sạch để tráng rửa bình sau mỗi lần sử dụng.

Lắp ráp: Lắp ống rửa mũi vào đầu dưới của bình (xoay hết các vòng cho đến khi điểm đánh dấu vị trí trên ống rửa thẳng với đường phân cách trên bình). Xem hình A.

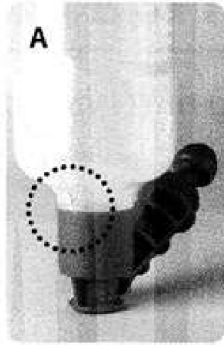

02. Pha một gói muối biển **ENTCLEAR®** (Gói muối này không phải là thuốc hay muối ăn. Muối này chứa các khoáng chất, các yếu tố vi lượng và các thành phần tự nhiên để bảo vệ niêm mạc mũi) với 300ml nước ấm ở nhiệt độ thích hợp với bạn, khoảng tầm 37°C, sẽ tạo thành dung dịch muối đẳng trương, có pH sinh lý. Không dùng các loại muối thông thường.




03. Đóng nắp của ống rửa mũi lại. Xem hình B.

04. Rót dung dịch nước muối biển ấm vào bình rửa mũi.

05. Đóng nắp phía trên bình lại.

06. Dùng một tay để giữ bình và ngón trỏ bịt lỗ thông khí ở nắp trên bình như hình C.

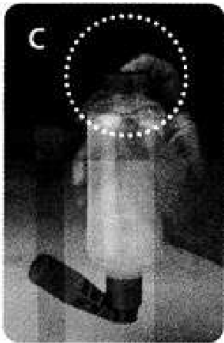


07. Mở nắp ống rửa mũi bên dưới bằng tay kia. Xem hình D.

08. Nghiêng người về phía trước với miệng mở rộng. Thở bằng miệng. Đặt đầu của ống rửa mũi thẳng với một bên mũi để ống rửa hoàn toàn tiếp xúc với lỗ mũi. Thả ngón trỏ khỏi lỗ thông khí ở nắp trên bình. Nước muối sẽ tự động chảy vào để rửa sạch hốc mũi và chảy ra ở lỗ mũi bên kia. (Dùng hết nước muối biển trong một lần. Không rửa cả hai bên mũi xen kẽ nhau). Tạm dừng rửa bằng

cách giữ chặt lỗ thông khí bằng ngón tay trỏ như hình E.

Không được nuốt trong khi đang rửa để tránh bị sặc.

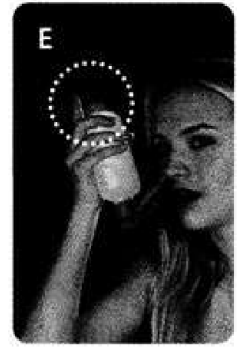

09. Khi dung dịch trong bình gần hết, không còn đủ áp suất, cần nghiêng chai để dung dịch chảy ra hết. Bỏ bình rửa ra ngay sau khi dung dịch đã chảy hết. Bịt bên lỗ mũi mà lúc rửa đã cho ống vào và hỉ mũi nhẹ nhàng để nước muối biển trong hốc mũi chảy ra hết. Sau đó, chuyển qua làm với bên mũi còn lại.

10. Nếu dung dịch không thể chảy ra khỏi một bên lỗ mũi, chuyển sang bên mũi kia và rửa. Nếu vẫn không thực hiện được (Do nghẹt mũi nghiêm trọng), tập thể dục làm ấm hoặc uống nước ấm trước khi rửa mũi.

Lưu ý:

Sử dụng nước uống còn mới để rửa. Đảm bảo nước không quá nóng.

Nên há miệng khi hỉ mũi hoặc hắt hơi để làm giảm áp suất.

Nghiêng người về phía trước khi hỉ mũi. Hỉ mũi từng bên một và dùng ngón tay để giữ bên mũi còn lại.

Hiệu quả ngay lần sử dụng đầu tiên, nên sử dụng lâu dài, kết quả tốt nhất đạt được sau khi sử dụng 2-3 tháng (Phụ thuộc vào các dấu hiệu và triệu chứng bệnh của bạn).

Thay bình rửa mũi **ENTCLEAR®** mới sau một năm sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn; không dùng chung bình rửa mũi với bất cứ ai.

Không nên chà xát mũi mạnh để phòng tổn thương niêm mạc mũi.

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM BỜ:



Hyphens

Asean's Specialty Pharma Company

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: VPDD Hyphens Pharma Pte. Ltd.

Hà Nội: 7/F, 315 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân.

Tel: (84-24) 3566 8560/61/62 - Fax: (84-24) 3566 8563

TP. Hồ Chí Minh: 139F Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận.

Tel: (84-28) 3997 4462 - Fax: (84-28) 3997 4463