

fitostimoline® proctogel

Với thành phần Rigenase® (chiết xuất từ lúa mì)

Gel bôi hậu môn

Fitostimoline® proctogel thuộc phân nhóm thiết bị dùng trong y tế, gồm gel bôi chứa trong tuýp nhôm và dụng cụ để tra gel. Fitostimoline® proctogel được sử dụng trong điều trị bệnh trĩ.

THÀNH PHẦN CỦA GEL:

Rigenase® (chiết xuất từ lúa mì), glycerine, hydroxyethylcellulose, phenoxxyethanol, polyethylene glycol 400, Mucosave® CG (chiết xuất từ cây Opuntia ficus indica, chiết xuất lá Olea europaea, maltodextrin), nước tinh khiết.

ĐẶC TÍNH

Fitostimoline® proctogel với công thức đặc biệt (có chứa Rigenase®), hình thành lớp bảo vệ niêm mạc trực tràng, hậu môn, giúp giảm ngay tức thì các triệu chứng như ngứa, rát và đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho da, niêm mạc phục hồi nhanh chóng, ngoài ra, còn giúp kiểm soát vi môi trường hậu môn.

Rigenase® là dịch chiết đặc biệt từ mầm lúa mì.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cần thận rửa sạch cẩn thận vùng hậu môn trước khi tra gel.

Cách dùng:

Trong lần sử dụng đầu tiên, xoay, mở nắp tuýp gel và đâm thủng màng nhôm của tuýp gel bằng phần nhọn trên nắp tuýp.

Xoáy, lắp dụng cụ chuyên dùng tra gel vào tuýp gel, bỏ phần nắp nhựa.

Bóp tuýp nhôm để lấy một lượng gel vừa đủ, tra gel vào vùng tổn thương (vùng hậu môn, trực tràng bị ngứa, đau rát...)

Lặp lại các bước trên trong những lần sử dụng tiếp theo.

Nếu phải thực tháo hoặc đi ngoài, chỉ tra gel sau khi thực tháo hoặc đi ngoài.

Rửa sạch dụng cụ chuyên dùng để tra gel và đóng nắp tuýp gel sau mỗi lần sử dụng.

Tần xuất bôi gel: Tra gel ít nhất 3 lần trong một ngày.

TÁC DỤNG BẤT LỢI:

Chưa ghi nhận trường hợp nào bị tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra bất kỳ tác dụng không mong muốn nào, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định đối với các trường hợp nghi ngờ mẫn cảm với các thành phần của gel.

Không ghi nhận các chống chỉ định với đối với phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ em và trẻ nhỏ, bệnh nhân sau mổ.

Nếu nghi ngờ, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.