

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: MUỐI Y TẾ NEWZEALAND

Chủng loại/mã sản phẩm: NEWZEALAND

THÀNH PHẦN: Muối tinh khiết (Natri Clorid) nhập khẩu Newzealand.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Pha nước rửa mũi: Rửa sạch dịch nhầy dư thừa và các tác nhân dị ứng như phấn hoa, hạt bụi, chất ô nhiễm và vi khuẩn. Dùng hằng ngày để vệ sinh và giữ ẩm niêm mạc xoang mũi. Giảm các triệu chứng viêm mũi như dị ứng, viêm xoang, ho hen, cảm lạnh, viêm mũi thai nghén, khô mũi, chảy nước mũi.
- Pha nước súc miệng họng: Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, bảo vệ vùng họng, khoang miệng không bị nhiễm khuẩn. Cải thiện nhanh các triệu chứng đau họng, ngứa họng, rát họng. Giúp làm sạch răng, miệng, lưỡi, máng bám răng, khử mùi hôi miệng. Giúp nướu và răng chắc khỏe.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Dùng cho người lớn và trẻ em cần dự phòng hoặc đang gặp các vấn đề về tai, mũi, họng, răng miệng bị viêm nhiễm do khói bụi, vi khuẩn và virus gây nên. Dùng an toàn cho người mang thai và cho con bú.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Hòa tan 1 gói muối 4,5g vào bình chứa 500ml nước sạch (Nên sử dụng nước ấm khi trời lạnh). Lắc đều cho tan muối và sử dụng.

- Dùng rửa mũi: Bóp nhẹ chai để dung dịch nước muối đi vào mũi và chảy qua đường mũi bên kia. Ngày 1-2 lần.

- Dùng súc miệng họng: Ngậm 20 – 30 ml, súc kỹ trong khoảng 30 giây, ngày 2 – 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2021
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên, chữ ký, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Vũ Trà My