

Dung dịch vệ sinh mũi **SeaCool®**  
*Sạch & thông mũi*

**Nước biển sâu SeaCool®** có thành phần **100% từ thiên nhiên**, an toàn trong việc chăm sóc và vệ sinh mũi hàng ngày, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho niêm mạc mũi, phòng ngừa các bệnh hô hấp, viêm mũi, viêm xoang. Làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng, viêm hô hấp trên, khô rát mũi họng và cảm mạo ở cả người lớn và trẻ em.

**Nước biển sâu SeaCool®** dùng dưới dạng phun sương mịn và hệ thống valve một chiều giúp lan tỏa sâu rộng trong khoang mũi và ngăn sự nhiễm khuẩn trở lại.

**Nước biển sâu SeaCool®** được tiệt trùng bằng tia UV, lọc bằng công nghệ siêu lọc kép. Rất an toàn và tiện lợi khi sử dụng hàng ngày cho trẻ em, người lớn, kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú.

**Cách dùng:**

1. Mở nắp bảo vệ, giữ chắc cổ chai giữa ngón cái và ngón giữa, đặt ngón trỏ lên vị trí nhấn.
2. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào mũi.
3. Ấn nhanh vòi phun từ 2 đến 3 lần mỗi bên mũi.
4. Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài và hít mũi.
5. Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ.

*Xịt 2 đến 4 lần trong ngày.*

**Bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp.

**Số đăng ký:** 70/2016/BYT-TB-CT

**SCB:** 190001344/PCBA-HCM

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**\* Lưu ý:** Các loại sản phẩm có Bạc hà không sử dụng cho Trẻ em dưới 3 tuổi.

**\* Thành phần thay đổi tùy theo dòng sản phẩm khác nhau:**

**Các sản phẩm Nước biển sâu SeaCool®**

TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	QUI CÁCH
SeaCool®	Nước biển sâu	Chai xịt phun sương 70 ml
SeaCool® Khuyneh điệp	Nước biển sâu, Khuyneh điệp	Chai xịt phun sương 70 ml
SeaCool® Bạc hà	Nước biển sâu, Bạc hà	Chai xịt phun sương 70 ml
SeaCool® Trẻ em	Nước biển sâu	Chai xịt phun sương 70 ml
SeaCool® Khuyneh điệp, Trẻ em	Nước biển sâu, Khuyneh điệp	Chai xịt phun sương 70 ml

*Sản phẩm được Bác sĩ khuyến dùng.*



Gamma Chemicals PTE



ALCOM Pharma J.S.C.  
Tel: 028 3762 8056 Fax: 028 3762 8057