

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GÓI MUỐI RỬA MŨI VÀ CHAI NHỰA ĐI KÈM SRK SALTMAX**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Trụ sở chính: 237 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Ngày 04 tháng 04 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1		Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1	Gói muối rửa mũi và chai nhựa đi kèm SRK SALTMAX	Gói muối rửa mũi và chai nhựa đi kèm SRK SALTMAX gồm một bình rửa mũi và các gói muối đi kèm
1.2	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Giảm dị ứng mũi và khô mũi. - Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi xoang tái phát hoặc cho con bú, viêm mũi dị ứng. - Giảm nhanh triệu chứng hen suyễn, nghẹt mũi, khô mũi. - Giảm triệu chứng chảy nước mũi. - Giảm các kích ứng mũi do bụi, khói... - Rửa mũi sau hóa trị liệu (ung thư)... - Điều hòa thân nhiệt, tránh cảm lạnh.
1.3	Hướng dẫn sử dụng	<p>Xem hướng dẫn sử dụng trên tờ hướng dẫn kèm theo.</p> <p>Bước 1: Vệ sinh dụng cụ bằng cách rửa qua nước nóng hay quay trong lò vi sóng 10-20 giây.</p> <p>Bước 2: Cho gói muối hỗn hợp SRK SALTMAX vào bình rửa cùng với nước sạch, nước qua xử lý máy lọc, nước đun sôi để nguội và lắc nhẹ cho đến khi hỗn hợp tan hết.</p> <p>Bước 3: Rửa mũi ở tư thế thẳng đứng, nghiêng người về phía chậu rửa, nhẹ nhàng đặt đầu rửa dụng cụ vào một bên mũi.</p> <p>Bước 4: Há miệng, thở bình thường, dùng tay bóp nhẹ nhàng để dung dịch từ bình chảy vào mũi bên này rồi sang mũi bên kia, sau đó nhả tay rồi bóp tiếp, lặp đi lặp lại động tác bóp nhả bình 2-3 lần để dung dịch có thể chảy liên tục qua mũi xoang, sẽ giúp rửa sạch hiệu quả và tạo cảm giác thoải mái.</p> <p>Bước 5: Xi nhẹ nhàng để làm sạch các dung dịch còn sót lại trong mũi xoang, sau khi thực hiện xong bạn cần lau sạch dụng cụ và để nơi khô ráo.</p>
1.4	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Liều dùng: mỗi ngày 1 gói, dùng 2 – 3 lần. - Dùng cho người lớn và trẻ em trên 5 tuổi - Đối với các bé nhỏ chưa ý thức được việc hít mũi để nước muối cuốn theo chất bẩn ra cần được người lớn hướng dẫn. - Khi hít mũi không nên hít quá mạnh vì nước có thể theo vòi mũi

		- Không sử dụng khi muối quá hạn sử dụng hoặc bị nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng. - Để xa tầm tay trẻ em. - Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
1.5	Chống chỉ định	Chỉ để rửa mũi, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác.
1.6	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Khi hít mũi không nên hít quá mạnh vì nước có thể theo vòi mũi lên tai giữa gây viêm và đau tai giữa.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước khác (nếu có) Chưa đăng ký lưu hành tại các nước khác.	
3	Chỉ định đăng ký ở các nước khác (nếu có) Chưa có chỉ định đăng ký lưu hành tại các nước khác.	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Hiện nay chưa có thông tin nào về an toàn sản phẩm đáng lưu ý	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Châu