

Thiết bị y tế

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TONIMER LAB: PANTHEXYL BABY SPRAY

(Xịt mũi)

**Thành phần:** Aqua (Nước), Xylitol, Panthenol, Maris Aqua (Nước biển), Axit Lactic.

Khí đẩy: không khí

**Mục đích sử dụng:** Tonimer Lab: Panthexyl Baby Spray là một dung dịch nước biển ưu trương vô trùng, để loại bỏ và làm lỏng chất nhầy ở mũi.

Thích hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ em trong các bệnh cảm lạnh có bội nhiễm vi trùng quá mức như viêm mũi họng, giúp phòng ngừa viêm tai giữa cấp tính với việc đóng dịch nhầy.

Xylitol và panthenol giúp làm sạch, bảo vệ, làm dịu, dưỡng ẩm và làm dịu màng nhầy, cải thiện hô hấp. Sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

**Cách dùng:** Sau khi tháo nắp, người dùng có thể sử dụng sản phẩm một cách độc lập, ở mọi vị trí.

Tuy nhiên, bạn nên sử dụng ở bồn rửa, đặt đầu nghiêng về một bên và đưa vòi phun vào lỗ mũi phía trên. Nhấn vào vòi phun trong khoảng 5 giây để sản phẩm tóa ra. Lặp lại quy trình tương tự với lỗ mũi còn lại. Đối với trẻ em cần người lớn hỗ trợ: cho trẻ nằm nghiêng sang một bên, đưa vòi vào lỗ mũi và ấn trong khoảng 5 giây. Cho trẻ nằm nghiêng sang bên kia và lặp lại với lỗ mũi bên kia.

Sau khi sử dụng, làm sạch và lau khô vòi phun và đóng gói qua phích cắm đặc biệt của nó.

**TẦN SUẤT SỬ DỤNG:** Từ 0 đến 3 tháng: 1-2 lần mỗi ngày trong 15 ngày hoặc theo lời khuyên của bác sĩ; Sau 3 tháng, 3-4 lần mỗi ngày trong 15 ngày hoặc theo lời khuyên của bác sĩ

Sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi

**Chống chỉ định:** Người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

**Thận trọng và cảnh báo:** Không sử dụng sản phẩm khi dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trong trường hợp có tác dụng phụ, không sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ. Tránh tiếp xúc với mắt; trong trường hợp sản phẩm dính vào mắt, rửa sạch bằng nước. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

**Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:** Chưa ghi nhận

**Bảo quản:** Van điều áp có thể vỡ nếu nóng. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn đánh lửa khác. Không hút thuốc. Không được khoan hay đốt, thậm chí sau khi sử dụng. Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 50°C/122 ° F

**Thể tích:** 100 ml

**Nhà máy:**

ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE, Via Gaggia 16, 20139,  
Milan, Italy

**Công ty Nhập khẩu và phân phối độc quyền:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM

Số 11, phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam



GIÁM ĐỐC  
DS. Lê Đức Hùng