

SINOMARIN®

NƯỚC BIỂN ƯU TRƯƠNG XỊT MŨI

Tương đương với dung dịch NaCl 2,3%

Mini, 30ml

Trẻ em, 100ml

125ml

MÔ TẢ

Lọ xịt mũi 30ml. Bơm xịt mũi định liều với hệ thống kháng khuẩn. Lọ chứa tối thiểu 180 xịt.

Lọ xịt mũi với đầu xịt mềm và được thiết kế theo hình dạng giải phẫu học của mũi. Có thể sử dụng ở các tư thế khác nhau. Chứa 100ml.

Lọ xịt mũi với vòi đầu xịt được thiết kế theo hình dạng giải phẫu học của mũi. Có thể sử dụng ở các tư thế khác nhau. Chứa 125ml.

THÀNH PHẦN

Nước biển 21ml, nước tinh khiết v.d. 30ml. Không chứa chất bảo quản. Không chứa khí đẩy.

Nước biển 70ml, nước tinh khiết v.d. 100ml. Không chứa chất bảo quản. Khí đẩy trơ: nitơ, không tiếp xúc với dung dịch nước biển.

Nước biển 87,5ml, nước tinh khiết v.d. 125ml. Không chứa chất bảo quản. Khí đẩy trơ: nitơ, không tiếp xúc với dung dịch nước biển.

CHỈ ĐỊNH

Rửa xoang mũi. Nghẹt mũi/sung huyết mũi.

LIỀU DÙNG

1-3 xịt vào mỗi bên mũi, 2-3 lần/ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.

1-2 xịt vào mỗi bên mũi, 2-3 lần/ngày. Rửa sạch đầu xịt với nước sạch sau mỗi lần sử dụng.

1-3 xịt vào mỗi bên mũi, 2-3 lần/ngày. Rửa sạch đầu xịt với nước sạch sau mỗi lần sử dụng.

CÁCH DÙNG

Tháo nắp bảo vệ màu xanh. Giữ lọ thẳng đứng để hoạt hóa bơm. Đưa đầu xịt vào trong lỗ mũi và ấn bơm. Đậy nắp lại sau mỗi lần dùng thuốc.

Tháo nắp bảo vệ và làm theo hướng dẫn mô tả bên dưới mà không cần quan tâm đến vị trí lọ xịt.

Tháo nắp bảo vệ và làm theo hướng dẫn mô tả bên dưới mà không cần quan tâm đến vị trí lọ xịt.

THẬN TRỌNG

Thận trọng đối với người quá mẫn cảm với nước biển.

Quá mẫn cảm với nước biển. Không dùng cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi khi không có chỉ định của bác sĩ.

PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN

Cảm giác châm chích hoặc rát thoáng qua có thể xảy ra ở những lần xịt đầu.

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG

Sinomarín chứa nước biển tự nhiên rất giàu muối khoáng và các nguyên tố vi lượng. Do vậy Sinomarín đảm bảo và tối ưu hóa việc rửa mũi bằng cách lấy đi các dịch tiết quá mức và vảy nhầy làm bít lỗ mũi. Sinomarín còn có tác động làm giảm sung huyết nhờ vào tính ưu trương.

LÀM SAO RỬA SẠCH XOANG MŨI HIỆU QUẢ

Rửa sạch xoang mũi là phương pháp đơn giản để tránh nguy cơ bội nhiễm đường hô hấp có thể xảy ra khi có tắc nghẽn ở mũi.

TRẺ EM

Sinomarín 30ml & 100ml

Đặt trẻ nằm ngửa, nghiêng đầu trẻ sang một bên (hình 1). Nhẹ nhàng đưa đầu xịt vào trong sát vách trên lỗ mũi và ấn nhẹ. Nghiêng đầu trẻ về phía ngược lại và lặp lại quy trình trên. Đưa trẻ về vị trí bình thường với một tay giữ sau đầu trẻ và làm sạch lỗ mũi.



Hình 1

NGƯỜI LỚN và TRẺ EM

CÓ THỂ TỰ THAO TÁC

Sinomarín 30ml, 100ml & 125ml

Nên tiến hành rửa mũi ở trên chỗ hứng (bồn rửa) như mô tả trong hình 2. Cúi nhẹ cổ ra phía trước và nghiêng đầu về một phía. Nhẹ nhàng đưa đầu xịt vào trong sát vách trên lỗ mũi và ấn nhẹ. Lặp lại quy trình trên sau khi nghiêng đầu về phía ngược lại.



Hình 2




Hình 3



125 ml

100 ml

30 ml

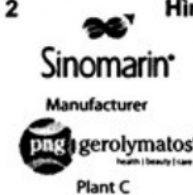

Bảo quản: dưới 25°C.

Hạn dùng: xem trên vỏ hộp.

Nhà sản xuất:

PNG Gerolymatos S.A., Hy Lạp.