

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHEKAT

Tên: DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI CHEKAT TRẺ EM.

Thành phần: Dung dịch vệ sinh mũi Chekat chứa nước muối biển, các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn, Mg, Se, I, Al... với nồng độ tối ưu cho sức khỏe niêm mạc.

Công dụng:

- Phục hồi và tăng cường sức khỏe niêm mạc, sát khuẩn, kháng viêm, giảm phù nề, giảm kích ứng niêm mạc.
- Làm loãng chất nhầy ứ đọng ở các khoang mũi, đào thải chúng cùng bụi bẩn, vi khuẩn, tác nhân gây bệnh, gây dị ứng, làm sạch niêm mạc mũi, xoang, giúp phòng ngừa và làm giảm nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi xoang, viêm đường hô hấp trên.
- Làm săn se niêm mạc, giúp mũi thông thoáng hơn.
- Làm ẩm mũi, giảm cảm giác khô rát mũi, họng khi không khí khô lạnh.

Đối tượng sử dụng:

- Người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, thay đổi thời tiết, không khí khô lạnh, để ngăn ngừa viêm mũi xoang, nghẹt mũi, sổ mũi, khô rát mũi, họng.
- Người bị nghẹt mũi, sổ mũi, khô rát mũi, họng do viêm mũi xoang cấp, mạn tính, viêm đường hô hấp trên, cảm cúm để giảm các triệu chứng trên.
- Có thể dùng lâu dài, an toàn. Dùng được cho phụ nữ có thai, cho con bú.

Cách sử dụng:

- Mở nắp bảo vệ, giữ chắc cổ chai giữa ngón cái và ngón giữa, đặt ngón trỏ lên vị trí nhấn.
- Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào mũi
- Ấn nhanh đầu phun từ 2 đến 3 lần mỗi bên mũi, nếu hít mạnh theo nhịp phun sẽ giúp tăng hiệu quả tác dụng.
- Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi.
- Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ.

Liều dùng:

- Xịt 3-5 lần/ngày vào 2 bên mũi, mỗi bên mũi xịt 1 – 2 lần.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 75ml.

Bảo quản: Ở nhiệt độ thường, tránh nắng mặt trời.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất ghi trên nhãn sản phẩm.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689

Fax: (0272).3817337

Điện Thoại: 1800.6689
(Trong giờ hành chính)