



FREE NOSE® ISOTONIC SEA WATER - XỊT MŨI NƯỚC BIỂN ĐẲNG TRƯỞNG

Vệ sinh mũi đúng cách rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Tiết quá nhiều chất nhầy trong khoang mũi có thể làm tăng sự sinh sôi của vi khuẩn có hại và làm niêm mạc mũi khô quá mức.

FREE NOSE® Sea Water làm ẩm sâu khoang mũi, làm sạch và loãng chất nhầy nhờ tác động cơ học, giúp nước biển thẩm thấu qua niêm mạc mũi một cách dễ dàng.

FREE NOSE® Sea Water giữ nguyên những tính chất thiết yếu của nước biển tự nhiên.

FREE NOSE® Sea Water được khai thác từ Vịnh Cancale ở Brittany, nơi nổi tiếng về chất lượng nước. Vịnh Cancale tự hào có biên độ thủy triều đặc biệt (12 m) và được cuốn bởi các dòng hải lưu mạnh giúp ngăn được sự ô nhiễm nguồn nước. Sự kết hợp độc đáo này đảm bảo nước liên tục tự làm sạch và luôn luôn tinh khiết. Việc lấy mẫu được thực hiện tự động khi chất lượng nước ở mức tối ưu (sau giai đoạn triều cường). Khu vực lấy mẫu được phân loại Cấp sạch A, chất lượng nước được theo dõi và kiểm soát liên tục (giới hạn vi sinh vật, tạp chất, thực vật phù du, độ pH...).

Thành phần:

Nước tinh khiết và nước biển (Natri clorid 0,9%).

Chỉ định:

Sử dụng **FREE NOSE® Sea Water** đúng cách trong vệ sinh mũi hàng ngày ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn cho phép hỗ trợ điều trị: viêm mũi họng, viêm mũi tắc nghẽn, viêm xoang, chứng khô mũi, khàn tiếng do niêm mạc mũi bị khô, hỗ trợ trong điều trị các bệnh thuộc khoa Tai mũi họng và khoa Nhi.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Tháo nắp bảo vệ.
2. Nhẹ nhàng đưa đầu phun chai xịt mũi vào một bên mũi và ấn xịt để đưa sản phẩm vào.
3. Để dung dịch dư chảy ra làm loãng chất nhầy, sau đó lau đi.
4. Lặp lại quy trình với bên mũi còn lại.
5. Làm sạch đầu phun bằng nước và lau khô.
6. Đậy nắp bảo vệ đầu phun chai xịt mũi cho đến lần sử dụng tiếp theo.

Dùng thường xuyên cho mỗi bên mũi khi cần thiết.

Hướng dẫn dùng sản phẩm cho trẻ nhỏ:

1. Đặt trẻ nằm đầu hơi nghiêng sang một bên để nước biển vào mũi dễ dàng hơn.
2. Tạo dịch phun mù trong vài giây bằng cách ấn đầu phun.
3. Cho trẻ ngồi dậy để nước mũi thoát ra ngoài. Loại bỏ chất nhầy bằng khăn giấy.
4. Lặp lại với mũi bên kia.
5. Nhẹ nhàng lau xung quanh hai bên mũi mà không đưa khăn giấy vào sâu trong mũi của bé. Làm sạch đầu phun bằng nước và lau khô. Dùng cho mỗi bên mũi 2 đến 3 lần một ngày.

Chống chỉ định và tác dụng ngoại ý:

- Chưa ghi nhận tác dụng phụ nào tại liệu khuyến nghị. Thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng phụ mà bạn gặp phải.
- Bất kỳ biến cố bất lợi nghiêm trọng nào liên quan đến sản phẩm này phải được thông báo cho nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan y tế.

Cảnh báo và thận trọng:

- Để đảm bảo vệ sinh và tránh lây truyền mầm bệnh, không nên sử dụng cùng một chai xịt cho nhiều người.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản và hạn sử dụng:

- Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng ghi trên hộp và vỏ chai.
- Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
- Bỏ chai và nắp bảo vệ vào các thùng chứa thích hợp.

Quy cách đóng gói:

Chai xịt áp suất nén 120 ml gắn với đầu phun.

FREE NOSE® Sea Water Xịt mũi nước biển đẳng trương – Lực ấn NHE. Trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi.


Ngày xem xét sau cùng: 27-01-2021

Nhà nhập khẩu, Nhà phân phối &
Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
6A3 Quốc lộ 60, Phường Phú Tân,
Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Điện thoại: (028) 3622 0205 - 18001745
Website: www.bepharco.com

Nhà sản xuất:

PHARMALINK, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès, BARCELONA - Tây Ban Nha
www.ysana.com - www.pharmalink.es

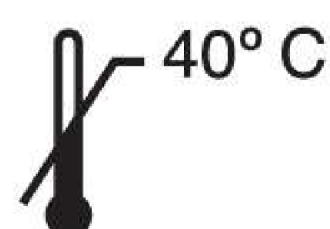

REF PL0032_120_Soft

