



Gel Silicone Kelosil giải pháp hiệu quả cho sẹo

Gel Silicone Kelosil là gel tự khô, không rích, được nghiên cứu và phát triển để làm mờ các vết sẹo kể cả sẹo cũ và sẹo mới. Gel Silicone Kelosil được dùng cho mọi loại da bao gồm khu vực tiếp xúc như mặt, cổ và các khớp. Khi được dùng theo chỉ dẫn, Gel Kelosil khô lại, tạo một tấm gel silicone, một lớp bảo vệ không thấm khí, chống thoát nước bảo vệ vết sẹo từ sự xâm nhiễm các chất hóa học, vi khuẩn, cho phép sẹo bình thường hóa qua trình tổng hợp collagen và tạo ra lớp da da mới thay thế tốt hơn.

Gel Silicone Kelosil được phát triển để làm mờ vết sẹo hiệu quả trên mọi loại sẹo như do phẫu thuật, tai nạn, chấn thương, vết cắn mụn trứng cá, do bỏng lửa và các bệnh khác của da.

Khuyến cáo lâm sàng quốc tế về điều trị sẹo đã nêu Gel Silicone nên được sử dụng như là liệu pháp đầu tiên về giải pháp sẹo và ngăn ngừa sẹo phì đại và sẹo lồi.

Gel Kelosil an toàn cho mọi loại và cho trẻ em.

Thời gian khuyến cáo dùng:

Kelosil được khuyến dùng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Vết sẹo lớn hơn hay lâu năm hơn có thể mất nhiều hơn thời gian sử dụng. Hiệu quả rõ hơn khi áp dụng cho vết sẹo mới sau 10 đến 14 ngày sau khi lành vết thương.

Chống chỉ định:

- * Kelosil không được dùng chữa bỏng da hay vết thương hở
- * Kelosil không dùng tiếp xúc với màng nhày hay vùng mắt.
- * Kelosil không dùng chung với phương pháp điều trị da khác mà không có sự tư vấn của Bác sĩ.
- * Kelosil có thể gây ố quần áo nếu không hoàn toàn khô.
- * Chỉ sử dụng ngoài da. Nếu kích ứng xảy ra, ngưng sử dụng và tham vấn ý kiến Bác sĩ. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Trọng lượng tịnh: 10gr

Cách dùng: sử dụng ngày 2 lần - thời gian cho kết quả tốt trong hơn 90 ngày

Gel Silicone Kelosil là loại gel silicone không thấm khí, các với các loại gel thông thường. Gel Silicone hiệu quả cho việc làm mờ sẹo khi sử dụng đúng chỉ dẫn

Gel Silicone Kelosil phải được áp dụng trên da sạch và khô, đảm bảo vết thương hoàn toàn kín trước khi dùng. Vì vậy sử dụng Kelosil ước tính 2 tuần sau khi vết thương lành.



Hướng dẫn sử dụng:

1. Làm sạch vết sẹo bằng xà phòng nhẹ và nước. Sau đó lau khô
2. Ép một lượng gel Kelosil trên đầu ngón tay và áp dụng vào khu vực sẹo Sau đó thoa rộng gel ra lên vùng bị ảnh hưởng đến khi gel được tán đều
3. Mát xa gel lên vùng ảnh hưởng cho đến khi nó hoàn toàn khô trong 1 - 2 phút.
4. Khi đã khô lớp silicone, có thể dùng mỹ phẩm hay kem chống nắng trang điểm.

Nếu không khô trong vòng 2 phút, nó có nghĩa là bạn dùng quá nhiều gel lên vùng sẹo. Lau phần gel thừa và mát xa cho đến khi nó khô lại

Bảo quản: dưới 30 độ C. Không sử dụng khi hết hạn - không tiết trùng

Thành phần: Cyclopentasiloxane; Dimethicone, Aqua, Cocamidopropyl betaine, PEG-75 lanolin, Fragrance.

Sản phẩm của: công ty TNHH Beyond Plus
200Moo4, Jasmine International Tower, 5th floor room 516,
Chaengwattana Rd, Pakkret, Nothaburi 10120, Thailand.

Được sản xuất bởi: Kovic Kate International (Thailand) Co.,Ltd
76/60,76/62,76/64, Changwattana Road, Anusawaree,
Bangkean, Bangkok 10220, Thailand.

Nhập khẩu & phân phối:

Công ty TNHH TM-DV Kết Giao Phát Triển Quốc Tế
9/3 Trịnh Đình Thảo - P.Hòa Thạnh- Quận Tân Phú. Tp.HCM
Việt Nam - Hotline: 84 8 39760415

Công bố MP-QLD (Bộ Y Tế): số 4010/16/CBMP-QLD

Hiệu lực lưu hành đến : 5/3/2021

Sản xuất tại Thái lan và tiêu chuẩn GMP /WHO