

KOOL PACH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG DỤNG :

Hỗ trợ hạ sốt, giảm đau đầu, đau răng.

ĐẶC ĐIỂM :

- Hạ sốt và giảm đau nhờ tác dụng hấp thu nhiệt và lạnh của miếng dán.
- Có cảm giác êm dịu khi dán.
- Hiệu quả kéo dài trong 08 giờ.
- Có thể dùng cho trẻ em và người lớn.

CÁCH SỬ DỤNG :

- Lấy 01 miếng Kool Pach ra, gấp chặt hai lần miếng nhôm để bảo quản miếng chưa sử dụng.
- Gỡ lớp nylon trong suốt ra khỏi mặt dính.
- Dán mặt dính lên vùng da sạch và khô (trán, nách, bẹn,...), không dán lên vùng da tổn thương và vết thương hở.
- Có thể cắt Kool Pach sử dụng theo kích cỡ cần thiết.

LƯU Ý :

- Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Chỉ sử dụng 01 lần, có thể dùng kèm thuốc hạ sốt nếu sốt quá cao.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ khi sốt tiếp tục kéo dài.

MIẾNG DÁN KOOL PACH KHÔNG CÓ THUỐC

NHÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN
74/13/14 Trường Quốc Dung - Q. Phú Nhuận - Tp.HCM
ĐT: 08-39975214 - 38444508

CÔNG TY TNHH GENDIS
Số 10 Lê Quý Đôn - Quận Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội