

Dựa trên **HYALURONIC ACID, CHLORHEXIDINE VÀ BROMELAIN.**

Viên đặt âm đạo **OVASTILL** là một thiết bị y tế giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh về niêm mạc âm đạo có nguồn gốc vi khuẩn (như viêm âm hộ - âm đạo) hoặc nấm (như nấm candida). Nhờ khả năng bảo vệ và giữ ẩm, nó hoạt động như một hàng rào làm giảm cảm giác nóng rát, ngứa và mẩn đỏ. Sản phẩm cũng hữu ích trong điều trị dự phòng những trường hợp thường xuyên mắc bệnh.

### CÁCH SỬ DỤNG:

1. Mở bao gói và rửa sạch tay trước khi sử dụng
2. Vệ sinh kỹ vùng sinh dục bằng dung dịch vệ sinh dịu nhẹ và lấy một viên đặt ra khỏi vỉ.
3. Đưa nhẹ nhàng viên đặt vào âm đạo, cố gắng đưa viên đặt vào sâu âm đạo, tránh rò rỉ, tốt nhất là vào buổi tối, trước khi đi ngủ.

### TẦN SUẤT SỬ DỤNG:

Điều trị: Mỗi ngày 1 viên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ, liên tục 10 ngày. Phòng bệnh: Theo chu kỳ mỗi ngày 1 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ, liên tục 8-10 ngày.

### THÀNH PHẦN:

Triglyceride C10-18, Bromelain, Silica, Maltodextrin, Dầu tràm leucadendron cajapu , Chlorhexidine digluconate, Natri Hyaluronate.

### BẢO QUẢN:

Giữ bao bì kín ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt ( $T < 25^{\circ}\text{C}$ ). Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì không còn nguyên vẹn. Không sử dụng sau ngày hết hạn. Ngày hết hạn chỉ có hiệu lực khi sản phẩm còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng cách.

### CẢNH BÁO:

Sản phẩm dùng cho âm đạo. Không nuốt. Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm và dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tránh xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng trong trường hợp bị thương. Trong trường hợp mang thai hoặc đang sử dụng đồng thời thuốc khác: Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc bác sĩ phụ khoa.

**10 viên đặt âm đạo 2 g**

 Hygge Health Care srl  
74121 Taranto (Ta) - Italia

info@hyggehealthcare.it  
www.hyggehealthcare.it  
**MADE IN ITALY**

 **CE** 0425  
Medical Device



10°C  25°C



rev.00 del 01/2020