

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỤNG CỤ PHÁT HIỆN THAI SỚM

Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày
(Sản phẩm được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam)

Dụng cụ phát hiện thai sớm dùng để thử nghiệm nhanh, phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày qua việc phát hiện sự có mặt của hormone nội tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu.

THÀNH PHẦN:

Kháng thể đơn dòng kháng hCG- α , Kháng thể đơn dòng kháng hCG- β , Kháng thể để kháng IgG chuột, H₂AuCl₄, Na₂HPO₄, NaH₂PO₄, Sucrose, NaCl, Triton-X, PVA-10, PVP-10, Na₂CO₃.

TIẾN HÀNH THỬ:

Nên tiến hành thử vào buổi sáng ngay khi thức dậy bởi nếu có thai, lúc đó nước tiểu có nồng độ HCG cao nhất (sẽ cho kết quả thử rõ nét hơn).

1. Lấy nước tiểu vào cốc, nên lấy nước tiểu giữa (không lấy nước tiểu đầu và cuối).

2. Lấy que thử ra khỏi túi, phải dùng ngay trong vòng 10 phút (mỗi que thử chỉ sử dụng một lần).

3. Nhúng đầu que thử theo chiều mũi tên chỉ xuống vào cốc nước tiểu (khoảng 10 - 15 giây)

Lưu ý: Mặt nước tiểu không vượt quá vạch ngang đầu mũi tên in trên que thử.

4. Đặt que thử trên mặt phẳng khô, sạch để quan sát.

Đọc kết quả sau 5 phút và trước 10 phút (Xem hình vẽ minh họa)

ĐỌC KẾT QUẢ:

1. Nếu có 2 vạch ngang màu hồng xuất hiện trên que thử, báo hiệu: **ĐÃ CÓ THAI** (dương tính).

2. Nếu có 1 vạch ngang màu hồng xuất hiện trên que thử, báo hiệu: **KHÔNG CÓ THAI** (âm tính).

3. Không có bất cứ vạch màu nào xuất hiện: Que thử hỏng do bảo quản, mẫu nước tiểu không đảm bảo hoặc thao tác thử sai. Trường hợp này, nên thử lại bằng một que thử mới với một mẫu

nước tiểu khác.

GHI CHÚ:

1. Nồng độ HCG còn thấp lúc mới có thai, khi thử có thể cho một kết quả âm tính (do thử quá sớm). Nếu nghi ngờ, nên lặp lại thử nghiệm với một mẫu nước tiểu khác sau 48 giờ.

2. Que thử được tin dùng và sử dụng phổ biến bởi độ chính xác cao (99%). Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau, kết quả thử có thể phản ánh không đúng:

- Túi đựng que thử bị rách hoặc hở, que thử bị nhiễm ẩm dẫn tới bị hỏng;


- Mẫu nước tiểu thử không tinh khiết do nhiễm máu, hoặc chất cặn bẩn trong cốc đựng mẫu thử; hoặc người thử có sử dụng các loại thuốc như: an thần, lợi tiểu, kháng co giật... (Các thuốc này có thể tồn tại trong cơ thể vài ngày sau liều cuối cùng) có thể cho kết quả dương tính giả.

- Người thử có tiêm HCG để kích thích rụng trứng (thuốc Propharse, Pregnil...) hoặc để duy trì giai đoạn hoàng thể, các dấu hiệu của hormone có thể tồn tại trong cơ thể tới 10 ngày sau liều cuối cùng, theo đó sẽ có kết quả sai khi thử (dương tính giả).

- Quá trình thử không theo đúng hướng dẫn.

- Do cơ địa của người thử (chiếm một tỉ lệ nhỏ) không có thai, nhưng trong cơ thể thường có nồng độ HCG cao hơn người bình thường, khi thử có thể cho kết quả dương tính giả.

3. Việc xác định có thai dựa trên nồng độ HCG, sẽ không phân biệt tình trạng có thai thông thường với tình trạng thai nghén bất bình thường.

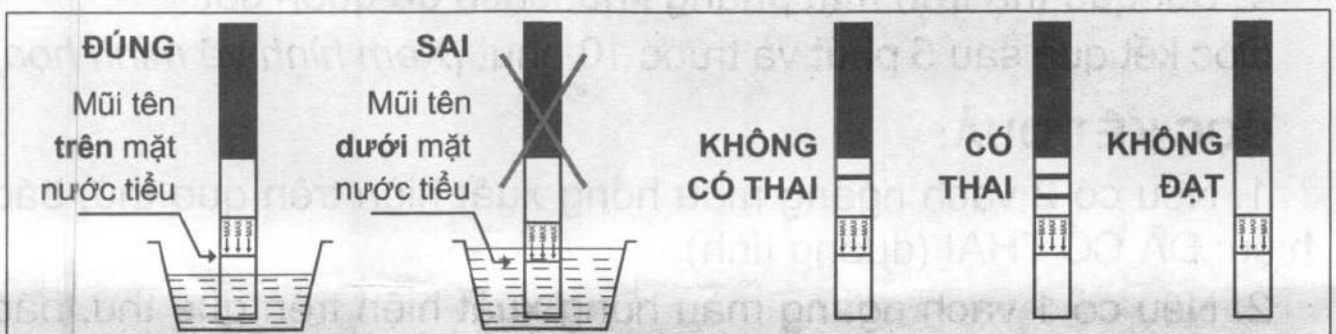

Nhà sản xuất

TANAPHAR®

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội