

STERIMAR™ SENSITIVE NOSE

CHỈ ĐỊNH:

- Làm sạch niêm mạc mũi và loại bỏ các bụi bẩn,, làm mềm dịch nhầy và gỉ mũi
- Làm ẩm và phục hồi độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi, tái tạo tế bào niêm mạc mũi bị tổn thương.
- Đặc biệt được khuyến cáo sử dụng sau phẫu thuật mũi và xoang
- Không mùi

CÁCH SỬ DỤNG

Dùng cho trẻ từ 6 tháng - người lớn.

Có thể sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ở lần dùng đầu tiên, xịt một nhát vào không khí để khởi động bình xịt.

Trong trường hợp làm sạch và tạo độ ẩm cho niêm mạc mũi: Tư thế thẳng đầu, đưa vòi phun vào từng lỗ mũi. Xịt 1-2 nhát mỗi bên mũi. Để dung dịch dư chảy ra ngoài và hỉ mũi.

Trong trường hợp làm sạch sâu hơn trong các xoang mũi: Tư thế nghiêng đầu sang một bên, đưa vòi phun vào lỗ mũi bên trên. Nhấn vòi phun lâu hơn để xịt từ 2-3 giây. Để dung dịch dư chảy ra ở bên lỗ mũi bên kia và hỉ mũi. Sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch vòi phun bằng nước xà phòng và để khô. Dùng 2-6 lần/ngày.

THÀNH PHẦN

STERIMAR™ Sensitive Nose là dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương*, **không mùi** với các thành phần như sau:

Nước biển: 31.82ml

Muối Sulphur

Nước tinh khiết vđ 100ml

Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) hoặc 100ml (Tương đương 300 nhát xịt)

Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng.

* *Dung dịch đẳng trương là dung dịch chứa cùng hàm lượng muối như trong tế bào cơ thể người.*