

# STRATADERM

## GEL ĐIỀU TRỊ SỌ XẤU

### Hướng dẫn sử dụng STRATADERM

- Rửa sạch và lau khô vết sọ.
- Thoa một lớp rất mỏng gel STRATADERM lên vết sọ và để tự khô trong 3-4 phút. Nhẹ nhàng loại bỏ phần gel thừa bằng khăn giấy hoặc đợi thêm một chút để gel khô hoàn toàn.
- Nên thoa STRATADERM một lần hoặc hai lần mỗi ngày lên các vết sọ cần điều trị hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
- Sau khi gel STRATADERM khô, có thể phủ lên trên bằng kem chống nắng, mỹ phẩm,

băng tạo áp lực hoặc bó bột.

### Thời gian điều trị

- Để có kết quả tốt nhất, nên duy trì lớp gel khô của STRATADERM hiện diện liên tục trên vết sọ 24 giờ trong suốt 7 ngày/tuần. Thoa lại STRATADERM như trên sau mỗi lần rửa trôi.

*xem tiếp trang sau*