

STRATAMED

GEL ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ

Hướng dẫn sử dụng STRATAMED

- Rửa sạch vết thương. Loại bỏ dịch tiết dư thừa hoặc chất lỏng từ vết thương trước khi thoa STRATAMED.
- Thoa một lớp rất mỏng gel STRATAMED lên vết thương và để gel tự khô trong 5-6 phút.
- Nhẹ nhàng loại bỏ phần gel dư thừa bằng khăn giấy hoặc gạc sạch để khô nhanh hơn. Nên thoa lại mỗi khi thay băng.
- Nên thoa STRATAMED một lần hoặc hai lần mỗi ngày tùy theo chỉ định của Bác sĩ.
- Sau khi gel STRATAMED khô - có thể được bảo vệ bên trên bởi kem chống nắng, mỹ phẩm, hoặc che phủ lớp gạc hay quần áo bên ngoài.

Thời gian điều trị

- Để có kết quả tốt nhất, nên duy trì lớp gel khô của STRATAMED hiện diện liên tục trên vết thương 24 giờ trong suốt 7 ngày/tuần. Thoa lại STRATAMED như trên sau mỗi lần rửa trôi.

xem tiếp trang sau

- STRATAMED được khuyến cáo sử dụng để điều trị tối thiểu trong 60-90 ngày như trên. Đối với vết thương lớn có thể điều trị lâu hơn.
- Tiếp tục sử dụng cho đến khi nhìn thấy tình trạng da không thay đổi hơn.

Cảnh báo

- Chỉ dùng STRATAMED để thoa ngoài. Không để tiếp xúc với mắt.
- Không thoa STRATAMED lên trên các trị liệu vết thương nào khác mà không có chỉ định của Bác sĩ.
- Gel STRATAMED khi dính vào quần áo có thể làm nhuộm màu quần áo. Giặt khô bằng hóa chất sẽ làm biến mất chỗ bị nhuộm màu mà không làm hư vải.
- STRATAMED không chứa thành phần kháng khuẩn.
- Ngưng sử dụng STRATAMED và hỏi Bác sĩ nếu vết thương của bạn bị kích ứng, ngứa hoặc có dấu hiệu bị nhiễm trùng, không lành.
- Không dùng cho vết thương tiết dịch nhiều, có nhiều góc ngách, vết bỏng độ 3.
- Giữ ngoài tầm với của trẻ con.
- Không dùng khi quá hạn sử dụng khi trên tube.

Hướng dẫn bảo quản: bảo quản dưới 25⁰C

Xem thêm thông trên www.stratamed.com

NK & PP bởi Công Ty Cổ Phần Nền Tảng

61/11 đường Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM

Tel.: (084) 3838 6706 | Fax: (084) 3838 6705