



Nova pharma  
Vì sức khỏe gia đình bạn

Xịt mũi

# NOVA

## Stemarin bebe



### Stuffy nose baby

Giúp làm sạch, thông thoáng đường  
thở ở mũi nhanh và hiệu quả



**Cholrure de sodium 1.7%**

#### THÀNH PHẦN:

Sodium chloride 1,7% , Sodium hyaluronate, Potassium dihydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate anhydrous, Potassium sorbate, Nước vừa đủ.

#### NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

Sản phẩm dạng phun sương với hệ thống van 1 chiều giúp ngăn chặn sự nhiễm bẩn trở lại, an toàn khi sử dụng. Giúp dung dịch đi sâu vào khoang mũi và có tác dụng nhanh.

#### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Giúp làm sạch, thông thoáng đường thở ở mũi nhanh và hiệu quả.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:** Trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi.

#### CÔNG DỤNG:

- Tác dụng hỗ trợ làm sạch mũi và góp phần thuyên giảm nhanh các tình trạng khó chịu ở mũi (nghe mũi, sổ mũi, ngứa mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng, ...)
- Giúp hạn chế việc sử dụng kháng sinh, thuốc co mạch, thuốc kháng dị ứng... để làm giảm các tình trạng bệnh ở mũi của bé.
- Hỗ trợ sát khuẩn, giảm phù nề, sưng viêm, làm sạch và thông thoáng đường thở nhanh nhưng vẫn giữ an toàn cho niêm mạc mũi nhạy cảm của bé.
- Hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mũi.

#### CÁCH DÙNG:

- Trẻ nhỏ từ 03 tháng đến 1 tuổi: Xịt 1 nhát xịt mỗi bên mũi, dùng 2 lần/ngày.
- Trẻ nhỏ từ 1 tuổi đến 3 tuổi: Xịt 1-2 nhát xịt mỗi bên mũi, dùng 2 - 3 lần/ngày.
- Sau khi xịt nước muối 1-2 phút, khi dịch nhầy mũi đã được làm loãng thì xì mũi nhẹ nhàng hoặc hút mũi (với trẻ nhỏ chưa biết xì mũi).

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt

Thương nhân đăng ký và đưa sản phẩm ra thị trường:

**CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K**

Địa chỉ: Số 4, ngõ 37 đường Kim Hoàng, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Website: novaminvietnam.com

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP**

Địa chỉ: Lô 16-17-18 đường Nguyễn Như Quế, TDP Văn Quan, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.



#### LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:

- Không xịt kéo dài quá 30 ngày
- Sau khi sử dụng vệ sinh đầu xịt sạch sẽ.
- Không tái sử dụng lọ và đầu xịt

**Tiêu chuẩn: TCCS**

**Số ĐKSP: 230000094/PCBA-HN**

