

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HYALO4 SKIN Gel

## Mô tả sản phẩm

**HYALO4 SKIN** gel là một chế phẩm bôi ngoài da có thành phần chính là axit hyaluronic. Axit hyaluronic là một polysaccharide sinh học (glycosaminoglycan) phân bố trong chất nền ngoại bào của hầu hết các mô. Do đặc tính ưa nước của nó, nó cung cấp môi trường ẩm xung quanh và giữa các tế bào, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các tế bào.

**HYALO4 SKIN** gel không màu, được ưa chuộng hơn vì lý do thẩm mỹ.

## Thành phần

**Thành phần chính:** Muối natri axit hyaluronic ở 0,2%

**Các thành phần khác:** Dung dịch sorbitol 70%, Natri dehydroacetate, Methyl p-hydroxybenzoate, Propyl p-hydroxybenzoate, Carbomer 980, Natri hydroxit, nước tinh khiết.

## Chỉ định

Gel **HYALO4 SKIN** được chỉ định để điều trị các kích ứng và tổn thương trên da. Đặc biệt, nó giúp che phủ các vết thương cấp tính và mãn tính (trầy xước, vị trí hiến tặng và vết mổ sau phẫu thuật, bỏng cấp độ một và hai, loét mạch máu và chuyển hóa, vết loét do tì đè) và cung cấp môi trường ẩm tại vết thương, do đó bảo vệ vết thương chống lại mài mòn, ma sát và mất ẩm.

## Liều dùng và cách dùng

Các vết thương hoặc vết loét cần được làm sạch và sát trùng trước khi điều trị. Bôi

một lớp mỏng gel lên bề mặt vết thương, hai hoặc ba lần một ngày, không quá 30 ngày liên tục. Khu vực điều trị nên được che phủ bằng một miếng gạc vô trùng và một băng vô trùng.

## Chống chỉ định

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với các thành phần của sản phẩm.

## Thận trọng và Để phòng

Không sử dụng trong trường hợp bao bì bị hỏng

Không sử dụng sản phẩm sau hạn sử dụng của sản phẩm ghi trên bao bì.

Hạn sử dụng để cập đến chỉ khi sản phẩm được giữ trong bao bì ban đầu ở nhiệt độ dưới 30°C.

Không dùng sản phẩm sau 2 tháng kể từ lần mở đầu tiên.

Tránh để bao bì tiếp xúc trực tiếp với vết thương.

Mỗi tuýp gel **HYALO4 SKIN** chỉ nên được sử dụng cho một bệnh nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trong trường hợp mang thai, cho con bú và sử dụng cho trẻ em, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm, vì tính an toàn và hiệu quả của **HYALO4 SKIN** trong những trường hợp đó chưa nghiên cứu.

Sau khi sử dụng, vứt bỏ theo quy định của quốc gia sản phẩm lưu hành.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

## Tác dụng không mong muốn

Các phản ứng có hại tại chỗ sau đây đôi khi có thể xảy ra: phát ban tại chỗ bôi