



Ocufresh®

Lubricating Eye Gel **Carbomer 0.2%**

THÀNH PHẦN:

Carbomer 980	2.0 mg
Cetrimide	0.1 mg
Sorbitol	40.0 mg
Sodium hydroxide	0.84 mg
Water for injections q.s.	

CÔNG DỤNG:

Giúp làm giảm các triệu chứng khô, khó chịu và kích ứng nhẹ do khô mắt. Dùng dưỡng ẩm sau các phẫu thuật mắt, tăng khả năng làm lành biểu mô sau phẫu thuật mắt và các tổn thương khác.

CÁCH DÙNG:

- Rửa tay kỹ trước khi sử dụng.
- Giữ ống thẳng đứng, lộn ngược và bóp nhẹ cho đến khi có một giọt ở đầu ống. Đặt giọt này vào mắt. Nháy mắt hai đến ba lần để trải đều gel lên mắt và lau sạch phần gel dư thừa xung quanh mí mắt. Đóng ống lại và đảm bảo rằng bạn không chạm vào đầu ống trên bất kỳ bề mặt nào (kể cả ngón tay).
- Nhỏ một giọt sản phẩm vào mắt bị bệnh 3-4 lần mỗi ngày hoặc theo yêu cầu, tùy thuộc vào mức độ khó chịu. Thời gian điều trị có thể kéo dài hơn 30 ngày sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.

NHÀ SẢN XUẤT: Blumont Healthcare Ltd,

Địa chỉ: 23 Moortown Close, Grantham, NG31 9GG , UNITED KINGDOM