

Humasis
QUE THỬ THAI

HELLO
BABY+

Phát hiện mang thai sớm

HELLO BABY PLUS

3
mins

Kết quả trong 3 phút với độ nhạy ở nồng độ hCG 15 mIU/ml

+

Kiểm tra nhanh hơn, chính xác hơn!!



Cho kết quả sớm hơn 4-5 ngày

Tại sao cần chẩn đoán mang thai sớm?

- Thông thường, khi bạn được chẩn đoán mang thai, thai kì đã được 4 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng.
- Từ 4 tới 15 tuần tuổi là giai đoạn đầu của thai kỳ vốn rất quan trọng trong việc hình thành tim, não và các cơ quan chính của trẻ, giai đoạn này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
- Do đó, để chăm sóc cho thai nhi một cách tốt nhất, cần chẩn đoán mang thai càng sớm càng tốt để kịp thời quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, thuốc men, các loại thức uống, thuốc lá, rubella và tia chiếu xạ, v.v.

[CHỈ ĐỊNH]

- Que thử thai Humasis HELLO BABY PLUS là thiết bị tự kiểm tra.
- Sản phẩm dùng để phát hiện mang thai sớm ở người thông qua xét nghiệm định tính hormone hCG (human Chorionic Gonadotropin) trong nước tiểu.
- Có hai phương pháp kiểm tra (Phương pháp nhúng và Phương pháp hứng), nên chọn cách thích hợp tùy theo hoàn cảnh.

[THẬN TRỌNG]

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

[MỘT HỘP BAO GỒM]

- 1 Que thử (dạng bút)
- 1 tờ Hướng dẫn sử dụng


[BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG]

- Bảo quản dưới dạng đóng gói trong túi kín ở 1 ~ 30 °C (34 ~ 86 °F)
- Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

[THÀNH PHẦN]

- Mouse Anti-hCG mAb conjugated to colloidal gold (Kháng thể đơn dòng chuột kháng hCG có gắn hạt keo vàng).....0.18±0.045 µg
- Mouse Anti-alpha hCG monoclonal antibody conjugated to Biotin (Kháng thể đơn dòng chuột kháng alpha hCG có gắn Biotin).....0.73±0.18 µg
- Mouse Anti-beta hCG monoclonal antibody conjugated to Biotin (Kháng thể đơn dòng chuột kháng beta hCG có gắn Biotin)0.73±0.18 µg
- Goat anti-mouse IgG (Kháng thể dê kháng IgG chuột)1.2±0.3 µg

[CẤU TRÚC]

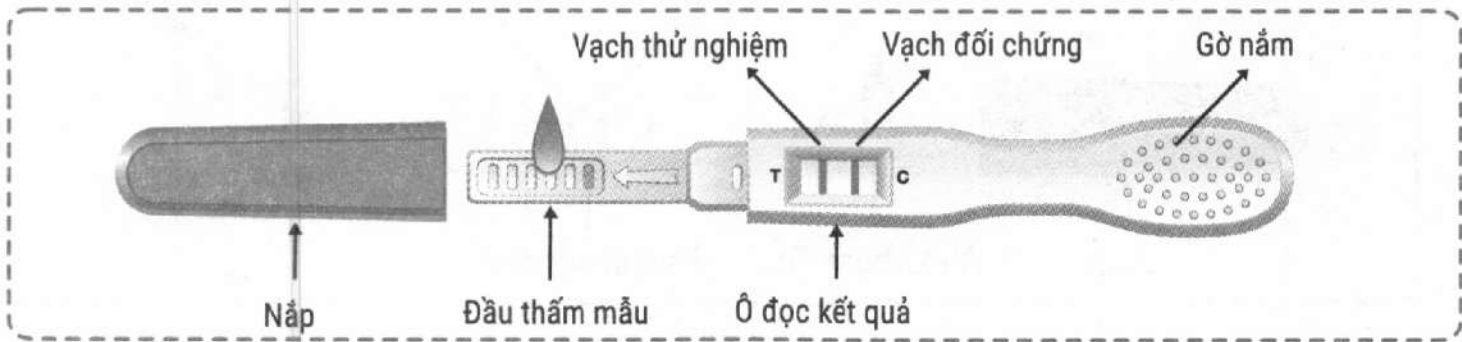

[PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG]


[CÁCH LẤY MẪU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÚNG]

- Mẫu nước tiểu cần được lấy vào hộp sạch và khô (cốc thủy tinh hoặc cốc nhựa) và sử dụng ngay.
- Có thể sử dụng các mẫu vật được lấy vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày; tuy nhiên, nước tiểu đầu tiên trong ngày có thể giúp bạn đạt được nồng độ hCG cao nhất.
- Nếu mẫu không được kiểm tra ngay lập tức, nên được làm lạnh và bảo quản ở 2 ~ 8 °C (36 ~ 47 °F) cho đến ngày sử dụng.
- Nếu mẫu được bảo quản trong tủ lạnh, chúng phải được thử nghiệm trong vòng 3 đến 4 ngày và cân bằng với nhiệt độ phòng trước khi thử nghiệm.

[QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM]


Phương pháp hứng

- Lấy que thử ra khỏi túi giấy nhôm ngay trước khi sử dụng.
LƯU Ý: Nếu que thử được bảo quản trong tủ lạnh, đợi que thử cân bằng với nhiệt độ phòng rồi mới tiến hành thử nghiệm (khoảng 30 phút).
- Giữ que thử bằng ngón tay cái và hướng đầu thấm mẫu xuống sau khi tháo nắp.
- Đặt đầu thấm vào nước tiểu đang chảy ít nhất 5 giây.
- Đầu thấm phải được làm ướt hoàn toàn bằng nước tiểu đang chảy.
- Đặt que thử trên bề mặt phẳng cho đến khi xuất hiện vạch màu trong ô kết quả.
- Chỉ giải thích kết quả sau thời gian phản ứng thử hoàn toàn là 3 phút.

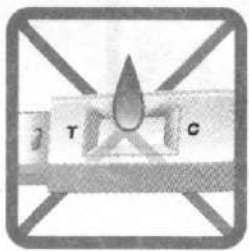


[HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ]

1. Âm tính (Không có thai)

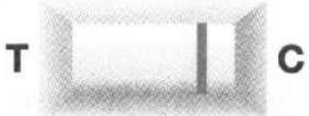

Chỉ có một vạch màu đỏ xuất hiện tại vạch đối chứng (C) và không có vạch màu nào trong vùng thử nghiệm (T). Kết quả này cho biết bạn không có thai. LƯU Ý: Nếu kinh nguyệt của bạn không bắt đầu trong vòng một tuần sau lần thử nghiệm thứ nhất, hãy lặp lại thử nghiệm lần 2. Nếu kết quả thử nghiệm lần 2 vẫn âm tính và kỳ kinh của bạn vẫn chưa bắt đầu, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

2. Dương tính (Có thai)

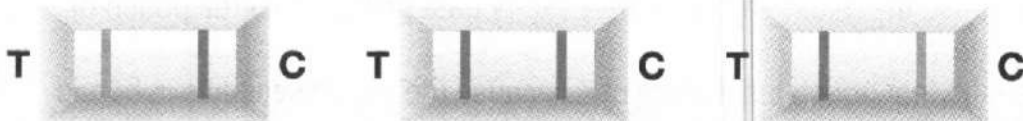

Hai vạch màu đỏ riêng biệt xuất hiện trong ô đọc kết quả: một vạch trong vùng thử nghiệm (T) và một vạch trong vùng đối chứng (C). Kết quả này cho biết bạn đã có thai. Cả hai vạch có thể nhạt hơn hoặc đậm hơn nhau.

LƯU Ý: Vui lòng gặp bác sĩ để xác nhận tình trạng mang thai và thảo luận về bước tiếp theo. Chăm sóc trước khi sinh là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe của bạn và thai nhi.

3. Không có giá trị



Thử nghiệm KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ nếu không xuất hiện vạch đỏ ở vùng đối chứng (C) trong 30 phút. Nếu kết quả là không có giá trị, có thể bạn không làm đúng quy trình hoặc que thử có thể hoạt động không bình thường. Xem lại quy trình thử nghiệm và lặp lại thử nghiệm bằng que thử mới. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Humasis Vina theo địa chỉ email: humasisvina@humasis.com.

[QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM]

Phương pháp nhúng

- Lấy nước tiểu trong dụng cụ sạch và khô.
- Lấy que thử ra khỏi túi giấy nhôm ngay trước khi sử dụng.
LƯU Ý: Nếu que thử được bảo quản trong tủ lạnh, đợi que thử cân bằng với nhiệt độ phòng rồi mới tiến hành thử nghiệm (khoảng 30 phút).
- Tháo nắp để lộ đầu thấm.
- Giữ chặt que thử và nhúng đầu thấm vào mẫu nước tiểu tối thiểu trong 5 giây.
- Lấy que thử ra khỏi mẫu nước tiểu.
- Đặt nó trên bề mặt phẳng cho đến khi xuất hiện vạch màu trong ô kết quả.
- Chỉ giải thích kết quả sau thời gian phản ứng thử hoàn toàn là 3 phút.

[HẠN CHẾ]

- Một số tình trạng khác ngoài thời kỳ mang thai, bao gồm bệnh nguyên bào nuôi thai kì và một số loại ung thư không phải nguyên bào nuôi, gây ra mức hCG tăng cao.
- Trong trường hợp sinh mổ, phá thai không hoàn toàn hoặc phá thai hoàn toàn gần đây, hCG được phát hiện trong vài tuần sau đó.
- Do đó nó có thể gây ra kết quả thử nghiệm sai hoặc không bình thường.

[CẢNH BÁO]

- Sản phẩm này sử dụng mẫu vật có nguồn gốc từ con người để thử nghiệm. Chúng nên được xem là có khả năng lây nhiễm và phải được xử lý cẩn thận sau khi sử dụng.
- Không sử dụng que thử sau khi hết hạn sử dụng in trên bao bì.
- Mới sử dụng ngay trước khi sử dụng vì que thử rất nhạy trong môi trường ẩm ướt.
- Thải bỏ: Tất cả các thành phần khác của bộ thử thai này có thể được xử lý như rác thải gia đình.
- Sử dụng bộ kiểm tra ngay sau khi lấy ra khỏi túi nhôm.

Nhà sản xuất: Humasis Co., Ltd.
Rm. 114, 502, 504, 604, 604-1, B03-1, B03-2, 88, Jeonpa-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH HUMASIS VINA
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B, Vườn ươm Doanh nghiệp, Lô D.01, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028 7300 8848
Email: humasisvina@humasis.com
Website: www.humasisvina.vn