

MULTIDEX®

THÀNH PHẦN CỦA MULTIDEX®

MULTIDEX® BỘT	MULTIDEX® GEL
Maltodextrin NF	Maltodextrin NF
Ascorbic Acid 1%	Ascorbic Acid 1%
	Glycerin
	Purified water

• Không chất bảo quản, chất màu, phụ gia, chất làm quánh, không mùi hoặc bất cứ thành phần hóa học nào khác được thêm vào Multidex

CHỈ ĐỊNH:

Multidex Bột và Gel có thể được sử dụng làm lành cho mọi loại vết loét, bao gồm cả vết loét nhiễm trùng và không nhiễm trùng.

- Đối với vết loét khô: sử dụng Multidex Gel
- Đối với vết loét ẩm: sử dụng Multidex Gel hoặc Bột
- Đối với vết loét tiết dịch nhiều: Sử dụng Multidex Bột

Lưu ý: Việc chăm sóc vết loét cần quan tâm đến các yếu tố: tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân, áp lực tại vết loét, các tổn thương/ tắc nghẽn mạch máu... Đây là những yếu tố làm giảm khả năng lành vết loét. Vì vậy, các yếu tố trên cần được can thiệp trong quá trình điều trị để có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Multidex được chống chỉ định đối với các vết bỏng độ III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MULTIDEX:

A. CHUẨN BỊ VẾT LOÉT:

1. Cắt lọc mô hoại tử tùy tình trạng vết loét hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
2. Rửa vết loét bằng nước muối sinh lý 0.9% hoặc dung dịch đẳng trương

B. SỬ DỤNG MULTIDEX BỘT HOẶC GEL

1. Sau khi rửa sạch, bôi Multidex:
 - a. Với vết loét nông: bôi một lớp dày khoảng 0.6cm trên toàn bộ vết loét.
 - b. Với vết loét sâu: đắp đầy vết loét cho bằng với mặt da, lưu ý để thuốc len vào hết góc ngách của vết loét.
2. Dùng gạc chống dính và băng keo / gạc cuộn / gạc lưới để cố định lớp băng
3. Thay băng thường xuyên 1 lần mỗi ngày đối với các vết loét tiết dịch ít và dang lên mô hạt, và 2 lần mỗi ngày đối với vết thương tiết dịch nhiều.

C. THAY BĂNG MULTIDEX

1. Nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp gạc chống dính. Nếu lớp gạc này dính vào vết loét, thấm ướt bằng nước muối sinh lý vài phút trước khi gỡ bỏ để không làm tổn thương lớp mô hạt non đang phát triển.
2. Nhẹ nhàng rửa sạch vết loét bằng dung dịch sinh lý vô trùng để loại bỏ các mảng mô chết, và giữ cho mô hạt mới tái tạo không bị tổn thương.
3. Không cần thiết phải làm sạch tất cả Multidex cũ. Một ít Multidex còn lại sẽ trộn lẫn với Multidex mới thoa vào.

Lưu ý:

Multidex có thể gây ra cảm giác rất nhẹ thoáng qua ở vài bệnh nhân
Sau khi mở nắp, có thể sử dụng được trong vòng 30 ngày.

Sản phẩm được sản xuất bởi DeRoyal-USA

Mọi chi tiết liên hệ:
0909 265 066 - 0903 907 690

 DeRoyal - USA

MULTIDEX®

Giải pháp tối ưu, làm lành các vết loét mãn tính



 DeRoyal - USA