

Thiết bị y tế

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TONIMER LAB: PANTHEXYL SPRAY

(Xịt mũi)

Thành phần: Aqua (Nước), Xylitol, Panthenol, Maris Aqua (Nước biển), Axit Lactic.

Khí đẩy: không khí

Mục đích sử dụng: Dung dịch nước biển ưu trương vô trùng, làm thông mũi niêm mạc và làm dịch nhầy. Được chỉ định để vệ sinh lỗ mũi khi bị cảm lạnh và đặc biệt để làm thông mũi trong các giai đoạn cấp tính của viêm mũi dị ứng, viêm xoang...

Cách dùng: Sau khi tháo nắp, người dùng có thể sử dụng sản phẩm một cách độc lập, ở mọi vị trí.

Tuy nhiên, bạn nên sử dụng ở bồn rửa, đặt đầu nghiêng về một bên và đưa vòi phun vào lỗ mũi phía trên. Nhấn vào vòi phun trong khoảng 5 giây để sản phẩm tóa ra. Lập lại quy trình tương tự với lỗ mũi còn lại.

Sau khi sử dụng, làm sạch và lau khô vòi phun và đóng gói qua phích cắm đặc biệt của nó.

Sử dụng 3– 4 lần một ngày trong 15 ngày hoặc theo lời khuyên của bác sĩ.

Chống chỉ định: Người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Thận trọng và cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm khi dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trong trường hợp có tác dụng phụ, không sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ. Tránh tiếp xúc với mắt; trong trường hợp sản phẩm dính vào mắt, rửa sạch bằng nước. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Chưa ghi nhận

Bảo quản: Van điều áp có thể vỡ nếu nóng. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn đánh lửa khác. Không hút thuốc. Không được khoan hay đốt, thậm chí sau khi sử dụng. Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 50°C/122 ° F

Thể tích: 100 ml

Nhà máy:

ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE, Via Gaggia 16, 20139, Milan, Italy

Công ty Nhập khẩu và phân phối độc quyền:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM

Số 11, phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam



GIÁM ĐỐC
ĐS. Lê Đức Hùng