

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Băng cá nhân tiệt trùng, chống thấm nước

URGO BRÛLURES WATERPROOF

MÔ TẢ:

Băng cá nhân tiệt trùng, sử dụng một lần, đóng gói trong bao bì riêng biệt, gồm:

- Lớp nền dính
- Miếng gạc dày thấm hút
- Lớp lưới lipido-colloid, không dính và thoáng khí, có chứa các hạt hydrocolloid và vaseline

Sản phẩm gồm 2 kích thước: 5cm x 7cm và 10cm x 7cm.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị bỏng cấp độ 1, bỏng cấp độ 2 trên bề mặt, và các vết thương bề mặt.

Vết thương bề mặt là gì?

Một vết thương hay vết cắt được xem là vết thương bề mặt nếu chỉ chạm đến bề mặt da hoặc lớp mỡ nằm ngay phía dưới. Nếu một vết thương bề mặt vượt quá 3cm, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trong vòng 6 tiếng sau khi bị thương để xác định xem có cần khâu hay chăm sóc y tế không (sử dụng băng keo phẫu thuật đặc biệt...).

Vết bỏng là gì?

Là một tổn thương da do tiếp xúc với nhiệt trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn. Vết bỏng có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau.

- **Bỏng cấp độ 1:** cháy nắng, bỏng nhẹ trong gia đình, tiếp xúc ngắn với nguồn nhiệt. Da còn nguyên vẹn nhưng đỏ và đau, không có nốt phỏng rộp hay rách da. Tự lành trong khoảng 5 đến 6 ngày.
- **Bỏng cấp độ 2 trên bề mặt:** xuất hiện vết phỏng rộp với dịch tiết trong suốt. Cảm thấy đau và lớp trung bì đỏ lên. Tự lành sau khoảng 10 ngày.
- **Bỏng cấp độ 2 sâu:** do tiếp xúc lâu với nguồn nhiệt (nước,

dầu sôi...) Vết phỏng rộp thường hay bị vỡ. Dưới lớp phỏng rộp, lớp trung bì bị đổi màu và đau nhẹ. Lớp biểu bì bị phá hủy và cần được chăm sóc y tế.

- **Bỏng cấp độ 3:** da bị cứng, trắng hoặc nâu, không còn cảm giác, hoàn toàn bị phá hủy và cần được chăm sóc tại bệnh viện.

ĐẶC TÍNH VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG:

- **Nền băng bán thấm thông thoáng,** cho thoát hơi ẩm nhưng chống thấm nước, giảm nguy cơ nhiễm trùng do các tác nhân bên ngoài.

- **THẤM HÚT DỊCH TIẾT** nhờ vào miếng gạc thấm hút.

- **GIẢM ĐAU** nhanh chóng.

- **THÚC ĐẨY LÀNH THƯƠNG:** khi tiếp xúc với dịch tiết của vết thương, gạc lưới lipido-colloid (công nghệ có bằng sáng chế được công nhận toàn cầu) tạo thành dạng gel cung cấp môi trường ẩm thuận lợi cho quá trình lành thương.

- **THAY BĂNG KHÔNG ĐAU** do lớp gạc lưới không dính vào vết thương.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cần sự hỗ trợ của người lớn khi sử dụng cho trẻ dưới 16 tuổi.

Đối với vết bỏng: giữ vết thương trong nước sạch và mát (không phải nước đá) 15 phút để tránh vết bỏng lan rộng. Nếu xuất hiện vết phỏng rộp, không được chọc thủng.

Trong tất cả các trường hợp:

1. Rửa tay sạch với nước và xà phòng. Rửa vết thương bằng nước hoặc dung dịch nước muối sinh lý. Sát khuẩn vết thương và vùng da xung quanh bằng dung dịch sát khuẩn không cồn; trong trường hợp bỏng, không sử dụng dung dịch sát khuẩn có màu như thuốc đỏ. Rửa lại bằng nước hoặc dung dịch nước muối sinh lý.

2. Lau khô vết thương cẩn thận và vùng da xung quanh bằng gạc vô trùng. Nếu chảy máu, cầm máu bằng băng ép.

3. Mở bao bì để lấy băng. Băng phải được sử dụng ngay sau khi mở bao bì.

4. Không để tay chạm vào phần keo dính khi dán băng và đảm bảo miếng gạc thấm hút màu trắng nằm chính giữa vết thương:

- Tháo một lớp cánh bảo vệ, dán băng lên bằng cách miết nhẹ miếng băng từ giữa ra viền băng: tránh để nhăn hay kéo căng da và băng.

- Tháo lớp cánh bảo vệ thứ hai và thực hiện tương tự.

TẮN SUẤT THAY BĂNG

Thay băng theo hướng dẫn sử dụng, sau 24 giờ cho lần băng đầu tiên, và sau mỗi 48 giờ cho các lần băng tiếp theo đến khi lành thương. Ngoài ra, cần thay băng khi: băng bị ẩm ướt sau khi tắm; băng đã thấm nhiều máu hoặc dịch tiết.

THÁO BĂNG: Tháo băng cẩn thận. Nếu còn sót gel sau khi tháo băng, rửa lại với nước sạch.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Tránh ánh sáng.

THẬN TRỌNG:

- Chỉ sử dụng cho các vết thương có kích thước không vượt quá kích thước miếng gạc thấm hút. Đối với vết bỏng, gạc thấm hút phải rộng hơn vết bỏng để đảm bảo thấm hút dịch tiết (kích thước miếng gạc màu trắng ít nhất phải gấp đôi kích thước vết bỏng).

- Nếu phát hiện dị vật trong vết thương, chảy máu nhiều, vết cắn, đâm bởi vật sắc nhọn và/hoặc bắn, hoặc tình trạng vết thương không cải thiện sau 6 ngày, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Nếu đối tượng bị bỏng là trẻ em, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Nếu phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng (nóng, vết đỏ lan rộng đến vùng da nguyên vẹn, đau, mủ, sưng, ...) cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng băng cho vùng da mặt vì lý do thẩm mỹ.
- Người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên sử dụng băng hydrocolloid dưới sự giám sát của điều dưỡng hoặc bác sĩ.
- Paraffin có thể bị hấp thụ vào băng cá nhân, quần áo và/hoặc giường và có thể bén lửa nhanh. Khi sử dụng các thiết bị y tế hoặc thoa các loại thuốc da liễu có chứa paraffin, cần tránh nguồn lửa cho đến khi vùng da và/hoặc quần áo, giường đã tiếp xúc với da được làm sạch.

CẢNH BÁO

- Việc tái sử dụng sản phẩm dùng một lần có thể gây nguy cơ nhiễm trùng.
- Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bao bì nhằm đảm bảo tính vô trùng của sản phẩm trước khi sử dụng.
- Độ bám dính của băng có thể bị ảnh hưởng bởi lông tóc hoặc các loại kem bôi nhờn dính hay khi dán ở các vùng xương khớp thường xuyên cử động.
- Không sử dụng khi tắm bồn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng cho bỏng cấp độ 2 sâu, bỏng cấp độ 3. Các trường hợp này bắt buộc phải có tư vấn của nhân viên y tế.
- Không dùng trên niêm mạc.
- Không dùng để bao phủ hoặc cố định thiết bị y tế.
- Chống chỉ định cho viêm động mạch chân.
- Chống chỉ định với nhiễm trùng bàn chân do đái tháo đường.
- Không sử dụng quá 30 ngày liên tục.

Ngày cấp CE Marking: 2018

Bản chỉnh sửa mới nhất: 02-2020