

 **URGO**

Burns & Grazes



Chỉ định

- Bỏng bề mặt và bỏng sâu cấp độ 2 (bỏng pô xe máy...)
- Vết thương bề mặt (trầy xước...)
- Các vết bỏng nhẹ trong gia đình
- Chỉ dùng cho người lớn. Đối với bỏng ở trẻ em, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ
- Không dùng cho: Bỏng sâu cấp độ 3

Hướng dẫn sử dụng



Khi bị bỏng, giữ vết thương trong nước lạnh 15 phút để tránh lan rộng



Làm sạch vết thương bằng dung dịch kháng khuẩn không cồn (rửa sạch với nước)



Lau khô băng một miếng gạc vô trùng



Tháo bỏ màng bảo vệ



Đặt lên vùng da cần được điều trị

Thời gian điều trị là 5-6 ngày, thay băng hàng ngày trong 2 ngày đầu tiên, sau đó thay băng sau 48 giờ

Thành phần:

Urigo Burn có thành phần là miếng dán không dệt, lớp nền là vải dệt sợi ngang phủ một lớp lipido-colloid, keo acrylic copolymer phân tán trong dung dịch nước, màng bảo vệ là polyester

**Cần cứ theo dữ liệu IMS tại Pháp về doanh số*