



URGOSTÉRILE

VI

URGOSTERILE,

Băng dính tiệt trùng

THÀNH PHẦN:

Băng Urgostérile chứa một lớp đỡ chất dính không dệt màu trắng và một lớp gạc không dệt bọc bằng một miếng gạc bảo vệ chống dính.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Vệ sinh và khử trùng vết thương.

Xả băng dung dịch NaCl đẳng trương bình thường, lau khô các rìa vết thương dùng miếng gạc tiệt trùng.

Mở túi và lấy băng ra, cầm hai mép bảo vệ. Dán Urgosterile, dần dần lột các mép bảo vệ. Trải mượt các cạnh.

Nên thay băng Urgosterile một lần mỗi 24 đến 48 giờ tùy vào điều kiện vết thương.

LỢI THẾ:

Urgosterile là băng có khả năng dung nạp cao với da. Nó hấp thu dịch, giúp thông thoáng vết thương và bảo vệ hoàn chỉnh vết thương, nhờ vào khả năng bám dính ở cả bốn bên.

CHỈ ĐỊNH:

Để băng các vết thương do phẫu thuật, khâu, chấn thương.

ĐỀ PHÒNG KHI SỬ DỤNG:

- Băng tiệt trùng cá nhân dùng một lần: Tái sử dụng sản phẩm dùng một lần có thể gây ra nguy cơ nhiễm trùng.
- (*) Đảm bảo rằng lớp bảo vệ tiệt trùng còn nguyên trước khi sử dụng. Không được sử dụng nếu bao bì bị hỏng
- Không được tái tiệt trùng.

CE 0459

Date of issue : 2005



Chỉnh sửa mới nhất: 03/2015

STERILE EO



Laboratoires URGO – 42, rue de Longvic- 21300 Chenôve- France