

Urgosterile

băng gạc tiệt trùng



THÀNH PHẦN:

Urgostérile là băng gạc tiệt trùng có một lớp nền bằng vải không đan dệt màu trắng có thể co giãn linh hoạt, được phủ một chất kết dính, và một miếng gạc bằng vải không dệt có khả năng thấm hút kèm một lớp chống dính.

Băng tiệt trùng (được tiệt trùng bằng etylen oxit).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Kiểm tra tình trạng bao bì trước khi sử dụng.
2. Vệ sinh, khử trùng cẩn thận vết thương và khu vực xung quanh vết thương.
3. Lấy băng ra khỏi bao bì ở phía được chỉ dẫn và tháo các màng bảo vệ.
4. Dán băng sao cho lớp gạc ở giữa che phủ hoàn toàn vết thương.
5. Dính băng chắc chắn ở cả 4 phía.
6. Tránh kéo căng trong quá trình dán băng gạc.
7. Thay băng thường xuyên khi cần.

ĐẶC ĐIỂM:

- Được thiết kế thoáng khí, sản phẩm này giúp vết thương luôn khô thoáng và tránh hăm bí.
- Khả năng bám dính tối ưu, không để lại dư chất trên da.
- Băng gạc tiệt trùng giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng.
- Với khả năng dung nạp trên da cao, sản phẩm phù hợp với mọi loại da.
- Gạc thấm dịch tiết ra mà không dính vào vết thương nhờ có lớp chống dính.
- Giúp bảo vệ toàn bộ vết thương nhờ khả năng dính ở 4 phía.

CHỈ ĐỊNH:

Bảo vệ và che phủ các vết thương trên bề mặt da (trầy xước, vết cắt), vết thương khâu tiết ít dịch và vết thương sau phẫu thuật.

Vết thương hoặc vết cắt được coi là vết thương bề mặt nếu nó chỉ xảy ra trên bề mặt da hoặc lớp mỡ ngay bên dưới da. Nếu vết thương trên bề mặt da do tai nạn lớn hơn 3 cm, cần hỏi ý kiến bác sĩ trong vòng 6 giờ sau khi xảy ra tai nạn để xác định xem có cần khâu hay xử lý vết thương không (dán băng dính phẫu thuật đặc biệt,...)

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Cần sự trợ giúp của người lớn khi dùng băng cho trẻ em dưới 16 tuổi.
- Băng tiệt trùng sử dụng một lần, không được tái sử dụng hoặc thay đổi vị trí băng đã dán để tránh nguy cơ nhiễm trùng và giảm khả năng kết dính của băng.
- Không khử trùng lại. Kiểm tra tình trạng lớp bảo vệ tiệt trùng trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng.
- Thường xuyên kiểm tra vết thương và khu vực xung quanh để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào như đau, tấy đỏ, phù nề, có mùi hôi hoặc có mủ.
- Không sử dụng trên các vết thương sâu không được khâu, các vết thương đang chảy máu hoặc tiết nhiều dịch.
- Cần thông báo mọi sự cố nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm cho Nhà sản xuất và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiêu hủy bằng phương pháp đốt. Nếu không thể đốt, việc xử lý rác thải phải tuân theo các quy định hiện hành về môi trường.