

vi GẠC LƯỚI LIPIDO-COLLOID TIẾP XÚC VỚI LỚP TẮM MUỐI BẠC

MÔ TẢ:

UrgoTul Ag/Silver là băng tẩm muối bạc được sản xuất bằng công nghệ Lipido-colloid (TLC), một công nghệ tiên tiến được phát triển bởi Laboratories Urgo.

Băng được cấu tạo bởi lớp lưới bạc làm từ các polyester tẩm hạt hydrocolloid (carboxymethylcellulose), vaseline, các polymer kết dính và muối bạc.

UrgoTul Ag/Silver không gây dính và bị, do đó không dính vào lòng vết thương.

ĐẶC TÍNH:

Khi tiếp xúc với dịch vết thương, các hạt hydrocolloid (CMC) tạo thành gel và kết hợp với lớp lưới tạo thành màng lipido-colloid.

Nhờ đó tạo ra các đặc tính sau:

- Duy trì môi trường ẩm giúp nhanh làm lành vết thương.
- Tạo gel tiếp xúc với vết thương.
- Khi tháo không gây tổn thương các mô mới hình thành.
- Dễ thay mà không gây đau cho bệnh nhân.
- Bảo vệ da xung quanh vết thương.

Hơn nữa các ion bạc của lớp lưới bạc làm lành vết thương (TCL) từ **UrgoTul Ag/Silver** còn có hoạt tính kháng khuẩn giúp làm giảm nhiễm khuẩn tại chỗ.

Bạc có hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng bao gồm các vi khuẩn gram âm và gram dương và một số loại nấm. Đặc biệt nó có tác dụng đối với tụ cầu (*Staphylococcus aureus*), tụ cầu kháng Methicilline (MRSA), liên cầu (*Streptococcus pyogenes*) và trực khuẩn mủ xanh là những vi khuẩn gây ra hầu hết các nhiễm khuẩn vết thương.

Trên in vitro cho thấy băng này có hoạt tính kháng khuẩn trong 7 ngày. Hoạt tính kháng khuẩn của băng cũng góp phần làm giảm mùi khó chịu của vết thương.

CHỈ ĐỊNH:

UrgoTul Ag/Silver được dùng tại chỗ cho các vết thương có nguy cơ hoặc dấu hiệu nhiễm khuẩn tại chỗ: các vết thương mãn tính (các vết loét ở chân, các vết loét do tỳ đè) và các vết thương cấp tính (các vết bỏng có độ sâu vừa phải, các vết mài mòn da, các vết thương do chấn thương, các vết thương do phẫu thuật...).

Do bản chất không gây dính, **Urgotul Ag/Silver** được khuyến cáo dùng cho các vết thương có vùng da yếu xung quanh vết thương.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng nước muối sinh lý làm sạch vết thương. Trường hợp cần dùng thuốc sát khuẩn trước, rửa kỹ bằng nước muối trước khi dùng UrgoTul Ag/Silver.
- Có thể dùng kéo vô khuẩn để cắt **UrgoTul Ag/Silver** sao cho vừa với kích thước của vết thương.
- Tháo các cánh bảo vệ băng.
- Đặt băng trực tiếp lên vết thương.
- Phủ lên **UrgoTul Ag/Silver** bằng một lớp băng thứ hai (miếng gạc vô khuẩn có khả năng hút dịch, cố định bằng băng dính).
- Đặt băng dính như đã nêu trên.
- Có thể thay băng **UrgoTul Ag/Silver** 1-3 ngày một lần phụ thuộc vào từng vết thương và quá trình lành vết thương.
- Thời gian dùng tối đa của **UrgoTul Ag/Silver** là một tháng.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Nên dùng **UrgoTul Ag/Silver** dưới sự theo dõi y tế.
- Việc sử dụng băng không thay thế cho việc điều trị bằng kháng sinh đường toàn thân đối với các vết thương nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của từng khu vực.
- **UrgoTul Ag/Silver** có thể dính vào găng tay phẫu thuật (cao su), do vậy nên sử dụng nước muối sinh lý làm ẩm găng tay để sử dụng băng dễ dàng hơn.
- Không khuyến cáo sử dụng đồng thời với các loại trị liệu tại chỗ khác.
- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ sinh non do thiếu dữ liệu lâm sàng.
- Các nhà lâm sàng, nhân viên y tế nên được biết rằng có rất ít dữ liệu lâm sàng về việc sử dụng lâu dài và lặp lại của các băng chứa muối bạc, đặc biệt là ở trẻ em và trẻ sơ sinh.
- Tránh tiếp xúc với các điện cực hoặc các gel dẫn điện trong quá trình đo điện, ví dụ như điện não đồ và điện tâm đồ.
- Không sử dụng trong một buồng cao áp.
- Băng vô khuẩn cá nhân dùng một lần: việc tái sử dụng các sản phẩm dùng một lần có nguy cơ bị nhiễm khuẩn.
- Kiểm tra lớp bảo vệ vô khuẩn còn nguyên vẹn trước khi dùng. Không dùng nếu lớp bảo vệ này bị hỏng.
- Không tiệt trùng lại băng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đã từng dị ứng với bạc hoặc các thành phần khác của băng.
- Không dùng cho các bệnh nhân khám cộng hưởng từ.