

XY
AQUAGEL

GEL BÔI ẤM ĐẠO HỖ TRỢ SINH SẢN



XY AQUAGEL là một sản phẩm giúp bôi trơn âm đạo, có thể sử dụng trong các trường hợp muốn mang thai.

Công thức dựa trên đường, muối khoáng, creatine, carnitine, acid hyaluronic và acid lactic giúp:

- Tạo môi trường tối ưu cho tinh trùng.
- Giúp duy trì độ pH phù hợp cho việc thụ thai tự nhiên.
- Có khả năng thẩm thấu tương thích với tinh dịch.

XY AQUAGEL là dạng gel không chứa tạp chất, công thức với chất bảo quản phù hợp với mục đích sử dụng, không chứa paraben, silicones, và dầu khoáng.

Cách sử dụng:

Sản phẩm được sử dụng trong suốt thời kì nang trứng, đặc biệt là trong giai đoạn dễ đậu thai nhất của chu kỳ (ngày thứ 13-14-15). Sử dụng 5 phút trước khi quan hệ.

1. Trước khi quan hệ, lấy 1 tube sản phẩm và mở nắp.
2. Dùng dụng cụ đưa sản phẩm vào trong âm đạo.

Thành phần:

Nước, Glucose, Fructose, Natri Hyaluronate, Magiê Citrate, Canxi Piruvate, Sorbitol, Acid Lactic, Acid Citric, Inositol, Kali Citrate, Sodium Bicarbonate, Kẽm Gluconate, Carnitine, Creatine, Natri Clorid, DMDM Idantoin, Natri hydroxide, Phenoxyethanol, Ethilexylglycerin, Hydroxyethylcellulose.

Cảnh báo:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Sử dụng liều đơn. Lượng sản phẩm trong mỗi tuýp nên được dùng 1 lần duy nhất.
- Bảo quản sản phẩm với tem niêm phong đúng cách, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt.
- Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn được in trên bao bì.
- Ngày hết hạn chỉ có hiệu lực đối với sản phẩm được bảo quản đúng cách.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hỏng hoặc đã mở.
- Thiết bị là không vô trùng.
- Sản phẩm không phải là một biện pháp tránh thai.
- **XY AQUAGEL** không có đặc tính tiêu diệt tinh trùng.
- Không sử dụng trong trường hợp màng nhầy bị tổn thương, sau khi phẫu thuật hoặc nhiễm trùng âm đạo cấp tính.
- Không được nuốt.
- Tránh tiếp xúc với mắt.
- Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với các thành phần có trong sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm kết hợp với các hợp chất amino bậc 4.
- Việc không tuân thủ chính xác các cảnh báo và hướng dẫn sử dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm hoặc gây ra các vấn đề trầm trọng và gây ra sự cố chưa từng xảy ra trước đây.

Tác dụng phụ:

Trong điều kiện sử dụng bình thường và hợp lý, bất kỳ tác dụng không mong muốn nào liên quan trực tiếp đến việc sử dụng sản phẩm hiện chưa được biết đến. Khả năng tương thích của nó đã được xác minh, nhưng trong trường hợp có hiện tượng kích ứng hoặc dị ứng, hãy dừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với bác sĩ / bác sĩ phụ khoa của bạn.

Đóng gói: 6 dụng cụ liều đơn x 5 ml.